


サムスリング-II
(骨盤固定スリング)

【禁忌・禁止】

以下の場合には使用しないこと。

- ・ 腰部に当てぬこと。
- ・ ポケットは空にしておくこと
- ・ 子供には使用しない。
- ・ その他、医師が不適当と判断した場合

【組成・形状・構造】 【原材料又は構成部品】

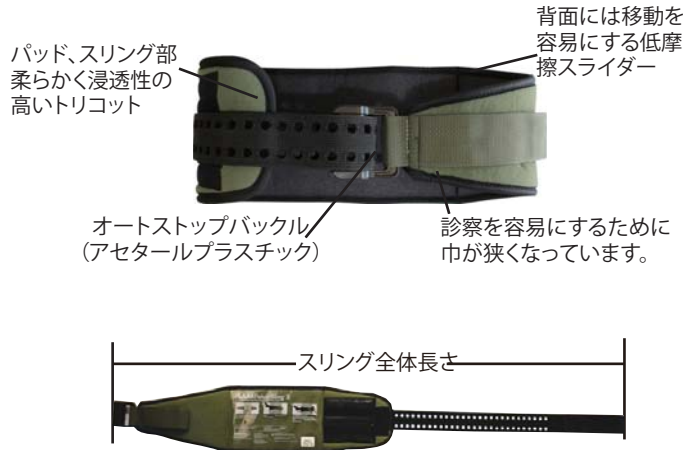

*注. サムスリング-IIは殆ど(98%)のヒップサイズに対応

【原材料又は構成部品】



品番: SAM4122
素材: パッド、スリング部(トリコット)
ハンドル部(ポリエステル)
バックル(アセタールプラスチック)

* サイズ: 最大幅約18cm x 全長約148cm
重量: 約260g
対応臀部サイズ: 約81cm-約127cm


【使用目的・効能又は効果】

損傷した、或いは損傷の疑いのある骨盤を固定すること。
サムスリング-IIは適正ニュートン値でオートストップする。


【操作方法又は使用方法】

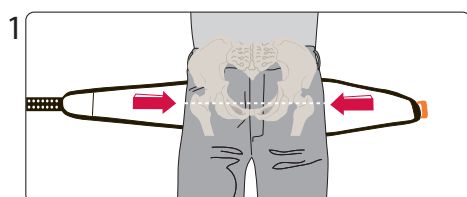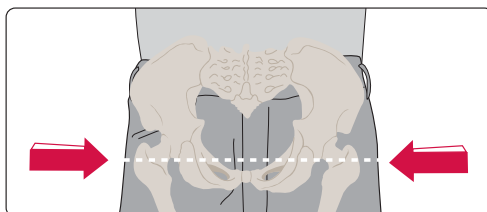

患者のパンツのポケットを空にしたり、臀部周辺に何も異物が無いことを確認する。スリングの白い面を上にして患者の大転子(臀部)の下に差し込む。

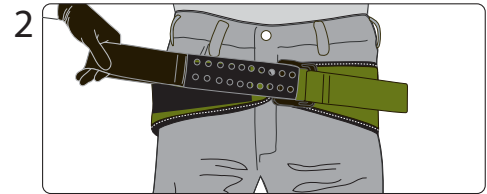

黒のストラップをバックルに通し、ストラップを引く。

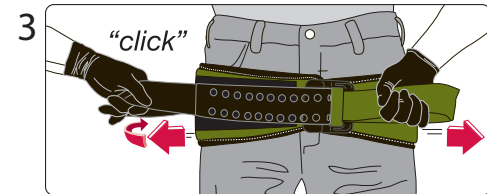

オレンジのストラップを掴み、黒のストラップを反対側に水平に「カッチ」とクリック音が聞こえるまで引っ張る。
(二人同時に両方から引っ張るのが望ましい。)
そのままの状態、黒のストラップをサムスリングの表面にしっかりと押しつける。

【MRI検査時の注意】

1. MRI検査時には必ず装着したまま検査すること。
2. 検査の前後にスリングを外して、そのまま放置しないこと。
3. スリングを外す時は医師の指示に従ってゆっくりと外すこと。

【その他の注意】

- ・ 汚れた場合は冷水で洗たく機での洗濯ができる。(洗濯アミの使用を推奨。)
- ・ 温水、漂白剤等は使用しないこと。
- ・ 洗濯後は完全に乾燥させてから使用すること。
- ・ 高圧蒸気滅菌器は使用しないこと。
- ・ スリングは繰返し使用できるが、消耗品的要素があるので、外見上汚れがひどかったり、使用上劣化がひどいと思われる場合は新品と交換すること。

【包装】 1個単位

【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

- ・ 水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売元: アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
製造元: ザ・シーバーク・カンパニー
(アメリカ・オレゴン州)