

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

TYKイージーガーゼ


再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【組成・形状・構造等】 【原材料又は構成部品】

パッケージ：パウチパック 約8cm x 6cm x 3cm

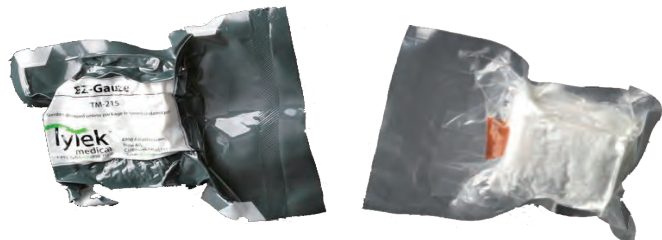

ロールガーゼ：

サイズ：巾約11.4cm x 長さ374cm
(2枚重ね /6重折に圧縮)

重さ：37g



素材：コットン/ポリエステル

【使用目的・効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法】

本品は単回使用である。

1. パッケージを開ける。
2. ガーゼ袋を取り出す。
3. ガーゼ袋を破り、ガーゼを取り出す。
4. 使用目的に応じ適宜使用する。

【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。
6. 本品は単回使用である。

【包装】1個単位

【使用期限】 パッケージ又は被包に表示

【貯蔵・保管】 常温・常湿

【主要文献及び請求先】

請求先：アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売元：アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
製造元：タイテック メディカル社
TyTek Medical, Inc.
(アメリカ・オハイオ州)