

医療用品 04 整形用品  
 一般医療機器機器 救急絆創膏 34864000  
**NAR Chest Seal コンボ**

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッケージ：約22.8cm x 12.7cm x 0.5cm



スタンダードとベント付きの2枚組



チェストシール：約15cm x 15cm



不織布: 10cm x 10cm 2重折

原理

粘着性のあるシールを貼ることにより損傷を閉塞する。  
 ベントにより胸腔内の空気を排気する。

原材料

- ・チェストシール アクリル系粘着テープ / ポリマー
- ・不織布：各1枚

【使用目的又は効果】

- ・救急医療において、胸部の損傷の閉塞、または胸腔内の空気の排気に用いる。

【使用方法等】

1. パッケージを開け、チェストシールを取り出す。
2. 傷口の汚れ/血液等を同梱の不織布で取り去る。
3. レッドチップ部分を持ち、透明シールを剥がす。
4. 傷口の中心にチェストシールを当てる。
5. しっかりと傷口にチェストシールを押し付ける。
6. チェストシールを剥がすときは医師の指導、監視下でレッドチップを持ち上げ、ゆっくり剥がす。

【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
- ・有効期間: パッケージに表示

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者: アコードインターナショナル株式会社  
 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4  
 TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752  
 製造業者: ノースアメリカンレスキュー社  
 North American Rescue, LLC  
 (アメリカ・サウスカロライナ州)