

医04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

## NARロールガーゼ

禁忌・禁止

再使用禁止

### 【組成・形状・構造等】

\*\*パウチバッグ : H7.6cm x W7.1cm x D3.0cm



ロールガーゼ :

サイズ : 巾約11.4cm x 長さ37.5cm  
(2枚重ね / 6重折に圧縮)

\*\*重量 : 36.9g

素材 : コットン/ポリエルテル

### 【使用目的・効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法】 下図の通り  
本品は単回使用である。

パウチを破り、ガーゼ袋を取り出す。



### 【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。
6. 本品は単回使用である。

【包装】 1個単位

【使用期限】 パッケージ又は被包に表示

【貯蔵・保管】 常温・常湿

### 【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売元: アコードインターナショナル株式会社  
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4  
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

\*製造元: ノースアメリカンレスキュープロダクツ社  
North American Rescue, Products, Inc.  
(アメリカ・サウスカロライナ州)