

【使用法】

1. パックを開けて救急外傷包帯を取り出し、創傷パッドを患部に当てます。



2. 創傷パッドが外傷部分を覆うように包帯を巻きつけます。



3. 包帯が創傷パッドを完全に覆っていることを確認します。



4. 付属の留めホックで包帯の両端を入れ、しっかりと留めます。



【使用上の注意】

- ・ 本品は単回使用です。
- ・ 本品は滅菌されています。
- ・ 開封後は完全滅菌状態ではありません。
- ・ 本品は圧迫包帯です。止血帯ではありません。止血帯を使用した場合は本品を緩めてください。



患部を圧迫

【貯蔵・保管方法】

- ・ 常温・常湿の場所に保管すること。

型番	品名	サイズ
NAR3031	救急外傷包帯-S	巾10cmx長さ140~200cm 創傷パッド 約 9x12cm
NAR3032	救急外傷包帯-M	巾15cmx長さ140~200cm 創傷パッド 約14x15cm
NAR3012	救急外傷包帯-L	巾15cmx長さ170~210cm 創傷パッド 約28x28cm

素 材： 包帯：ポリエチレン

パッケージ：真空圧縮滅菌

有効期限： パッケージに表示



NAR3031



NAR3032



NAR3012

NAR3012
腹部への装着

