
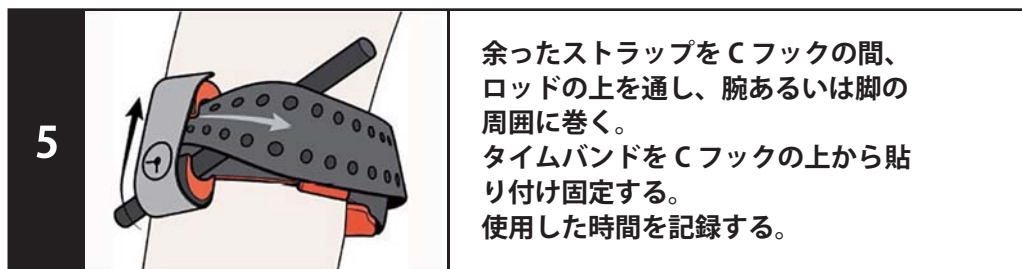
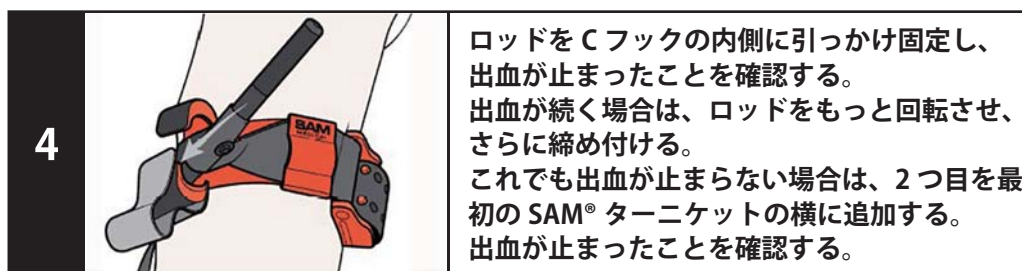
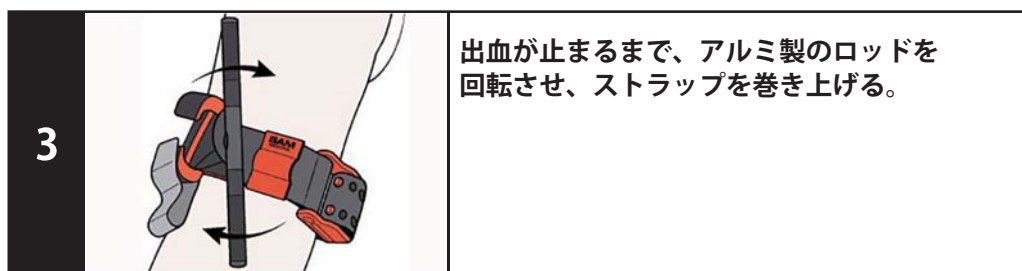
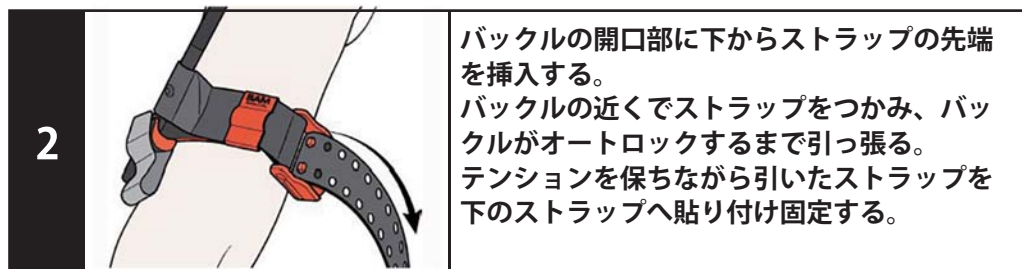


SAM[®]ターニケットXT

四肢用ターニケット

使用説明書

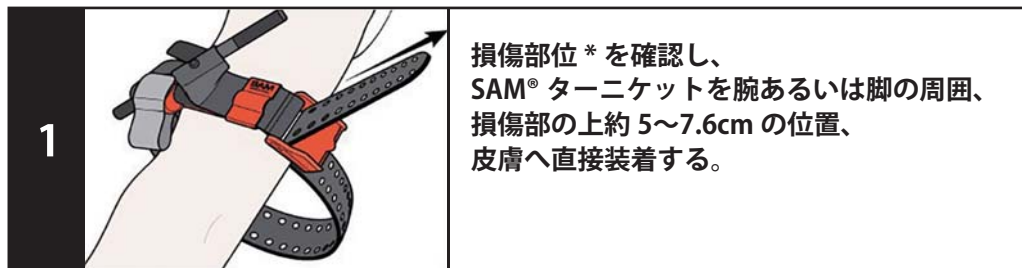

注意

SAMターニケットを衣服の上から装着する時は、衣服内に、固形物が無いことを確認する。

*損傷部位がすぐにわからない場合は、SAM[®]ターニケットを損傷した腕あるいは脚のできるだけ高い位置に装着する。状況が許せば、損傷した四肢を再評価し、SAM[®]ターニケットを損傷部の上約5~7.6cmの位置、皮膚に直接装着する。


SAM[®]ターニケットXT

ORANGE


使用説明書



SAM[®]ターニケットXTは、ミリタリーガイドライン、EMSの権限、医師の監督のもと使用してください。

 アコードインターナショナル株式会社

製品スペック

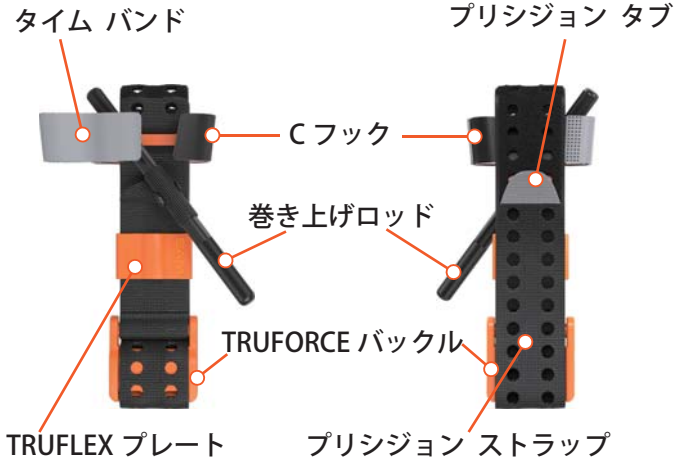

一般医療機器 製造販売届出番号：13B3X00138000058

製品名	SAMターニケットXT (オレンジ)
製品番号	SAMXT-C
サイズ	L92.5cm x W3.8cm
パッケージ	L6.3cm x W3.8cm x H18.4cm
重量	約 108g
適用範囲	13.9cm - 88.9cm
原材料	ストラップ：ナイロン バックル・プレート：プラスチック ロッド：アルミニウム

米国製



開発製造：シーバーク社
(米国・オレゴン州)

アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005
TEL 03-3299-6751 FAX 03-3299-6752
e-mail: Accord@accord-intl.com http://www.Accord-INTL.com

SAMXTの取り外し方

