

医05 副木
一般医療機器 成型型副木 36204000

サムスプリント

【禁忌・禁止】

【効能・効果・使用目的】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。

【組成】

- ① 中側： アルミ合金
 - ② 両外側： ウレタンフォーム貼り
- ・未滅菌


【形状】



SAM1121 サムスプリント スタンダード
サイズ： 約108x914x5mm (130g)



SAM1410 サムスプリント ジュニア
サイズ： 約108x457x5mm (65g)

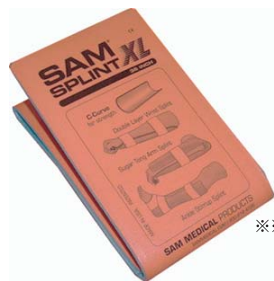


※※SAM1191 ラージスプリント
サイズ： 約140 x 914 x 5 mm (165g)

【効能・効果・使用目的】

骨折や挫傷等の固定に使用する。

【使用方法】

1. 首への装着法

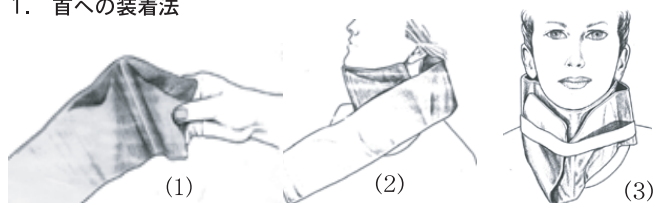

2. 小指への固定法



3. 脱臼の為の三角形の組立



4. 上腕部への装着



5. 手首、ひじをサポートする場合



6. 足首の脱臼に



7. スタンダードを2枚を使って脚やひざに

【サムスプリントの強度アップ方法】



長さに沿って湾曲させるとスプリントは強くなる。

外側の端を反対に向けて曲げると更に強化される。

サムスプリントを二重にしたり、T字型に曲げると更に強くなる。

【使用上の注意】

- 使用前に使用方法を熟読し、装着トレーニングを行い、熟知した上で使用すること。
- 装着部位に悪影響があると思われる場合は、直ちに使用を中止すること。
- サムスプリントはアルミ合金の両面にウレタンフォームを貼り合わせてあるので、ハサミで好みの長さにカットする場合、カット面にアルミ合金の端がでて、手指をきずつけることがあり得る。危険なので、カットした場合は右の図の様に折り曲げて、使用するか又はテープ等でカット面を覆って使用のこと。
- 再使用する場合は使用直後に中性洗剤で手洗いし、良く乾燥させて、保管すること。
- 製品は繰り返し使用が可能であるが、消耗品的要素があるので、使用上劣化が激しいと思われるときは当該品の使用を取りやめ、新品と取り替えること。
- 上記5. により使用を止めた製品は不燃性ごみとして処理すること。



【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

- 水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 再使用可能であるが、上記【使用上の注意】5項に準ずる。

【包装】

SAM1121	サムスプリント	スタンダード	1個単位
SAM1410	サムスプリント	ジュニア	1個単位
※※SAM1191	サムスプリント	ラージ	1個単位

【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売元：アコードインターナショナル株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4

TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造元：ザ・シーバーク・カンパニー（アメリカ・オレゴン州）
The Seaberg Company, Inc.


頌椎への装着、調整法



フィンガースプリント




拇スバイカスプリント

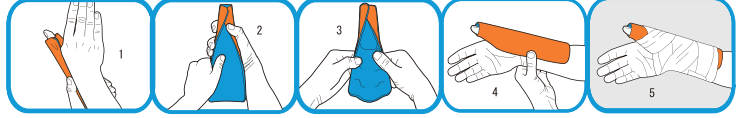


掌側/手首スプリント




尺側ダブルスプリント

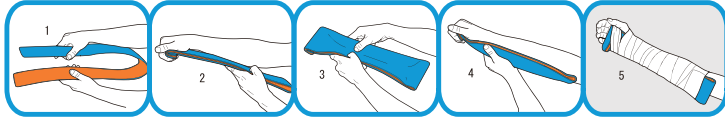

肩/上腕部スプリント

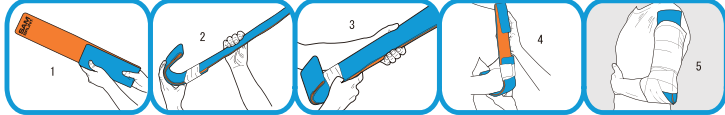


尺側スプリント

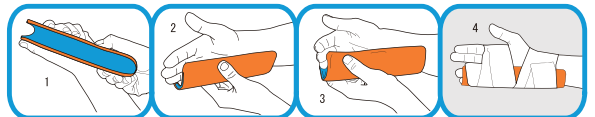


シュガートーンスプリント




脱臼肘スプリント

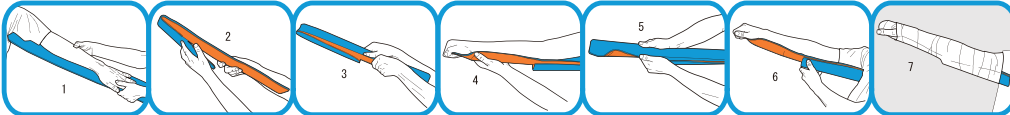


尺側T字型スプリント

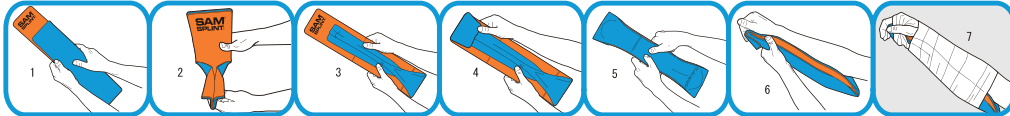

膝関節スプリント

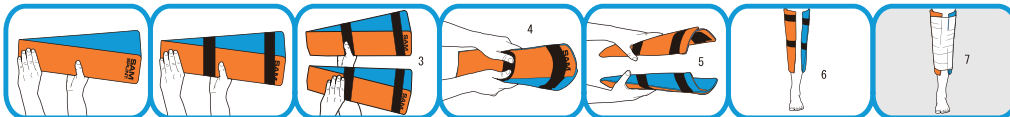


脚足コンボ8字型スプリント

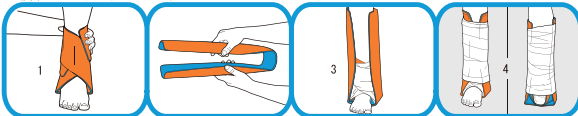


脚足スプリント



脚足スプリント

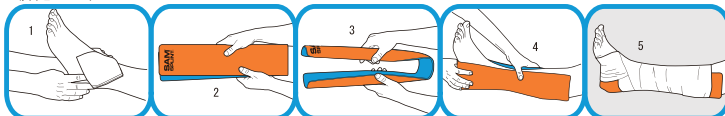

足首8字型スプリント

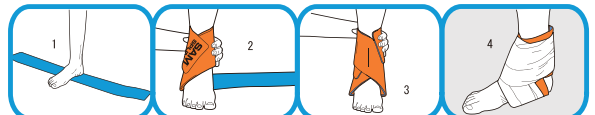

脚足ダブルスプリント




その他の用法




【サムスプリント強度アップ法】


C字型カーブ

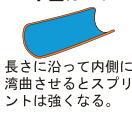

逆C字型カーブ

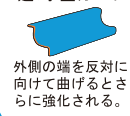

T字型カーブ

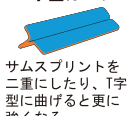

【使用上の注意】

1. 使用前に使用方法を熟読し、装着のトレーニングを行い、熟知した上で使用すること。
2. 装着部位に悪影響があると思われる場合は、直ちに使用を中止すること。
3. サムスプリントはアルミ合金の両面にウレタンフォームを貼り合わせてあるので、ハサミで好みの長さにカットすること。カット面にアルミ合金の端がでて、手指を傷付けることがある。危険なので、カットした場合は右の図の様に折り曲げて、使用するか、又はテープ等でカット面を覆って使用すること。
4. 再使用する場合は使用直後に中性洗剤で手洗いし、良く乾燥させて、常温の場所に保管して置くこと。

