

未承認品・販売予定




モーガンレンズ

The Morgan Lens
MorTan Inc.

緊急時のハンズフリー眼洗浄システム


受傷者の苦痛と医療スタッフの負担を大幅に軽減します

1

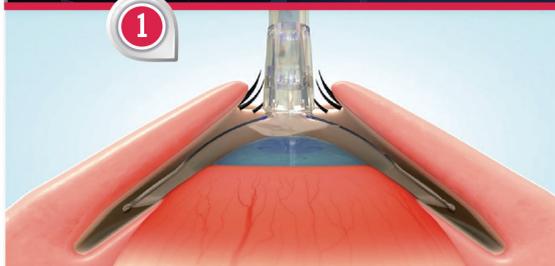


眼を閉じたまま、受傷した角膜や結膜を連続的にくまなく洗浄します。

2

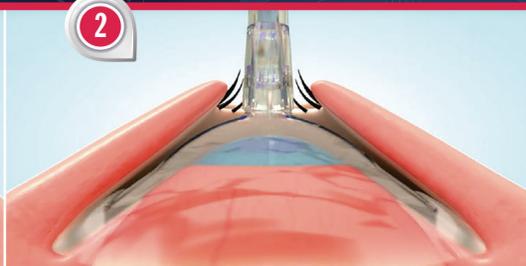

洗浄開始まで 20 秒以内。
シンプルな設計で簡単・迅速に
使用できます。

3

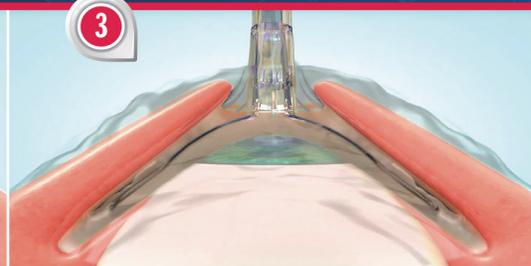

眼にセットした後はハンズフリー
で洗浄を継続。
洗浄しながらの搬送や、他の部位
の治療も可能です。

モーガンレンズは眼の化学熱傷の緊急治療や眼内異物の除去において、米国内の 90%以上の病院での使用実績があります。



アコードインターナショナル株式会社

製品構成 (オプション含む)



MT6673

モーガンレンズ

ハンズフリーで角膜や結膜の眼洗浄や、薬物投与を行うことができます。モーガンレンズは数時間～数日間眼内に留置することが可能で、重度の化学熱傷に必要とされる継続的な治療を提供します。

12 個入り / BOX



MT202

デリバリーセット オプション

デリバリーセットにモーガンレンズ2つを接続することで、両眼を同時に洗浄することができます。

6 個入り / BOX




MT63

メディダクト オプション

洗浄液の回収用のダクトです。超吸収性素材により洗浄液を効果的に回収します。

12 個入り / BOX

使用方法

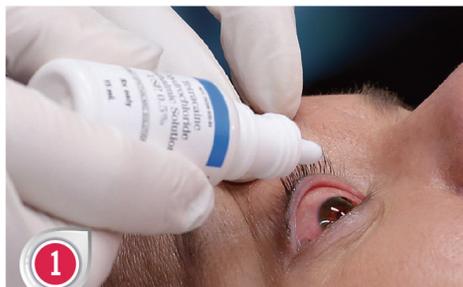

1 レンズの挿入
必要に応じて事前に点眼麻酔を行います。



2 滅菌済みの包装を開封し、モーガンレンズにデリバリーセット（または輸液セットなど）を接続します。



3 適切な洗浄液を使用し、最小限の流量になるように調節します。これにより、レンズが角膜と強膜の上に「浮く」ようになります。洗浄液を流したままレンズを挿入していきます。



4 患者に下方向を見てもらい、上まぶたを軽く持ち上げてレンズを目の上部に挿入します。次に上方向を見てもらい、下まぶたを引いてレンズを挿入します。



5 適切な流量に調節して洗浄を開始します。流出した洗浄液はメディダクトを用いて回収します。モーガンレンズの脱落を防ぐため、チューブを患者の額にテープで固定してください。



6 取り外し（洗浄液は流したままにします）
患者に上方向を見てもらい、下まぶたを引いた状態でレンズをスライドさせるように取り外します。レンズを取り外してから洗浄液を止めます。

禁忌： 突起した異物がある場合、貫通性の眼球損傷がある場合、眼球破裂やそのおそれがある場合には使用しないこと

製造：
The Morgan Lens モータン社
MorTan Inc. 米国・モンタナ州



輸入販売：アコードインターナショナル株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005
TEL 03-3299-6751 FAX 03-3299-6752
www.accord-intl.com