

医05 副木
一般医療機器 成型型副木 36204000

サムスプリント

【禁忌・禁止】

【効能・効果・使用目的】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- ① 中側： アルミ合金
- ② 両外側： ウレタンフォーム貼り



SAM1121 サムスプリント スタンダード
サイズ： 約108x914x5mm (130g)



SAM1410 サムスプリント ジュニア
サイズ： 約108x457x5mm (65g)




SAM1191 ラージスプリント
サイズ： 約140 x 914 x 5 mm (165g)

【使用目的又は効果】

骨折や挫傷等の固定に使用する。

【使用方法】

1. 首への装着法

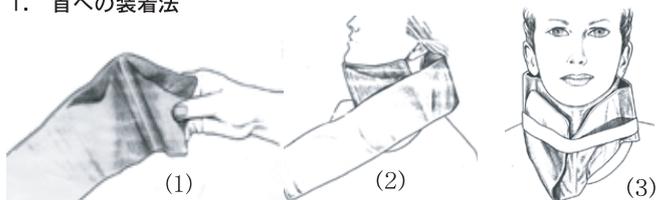

2. 小指への固定法



3. 脱臼の為の三角形の組立



4. 上腕部への装着



5. 手首、ひじをサポートする場合



コレス骨折の治療や点滴用副子として

6. 足首の脱臼に



7. スタンダードを2枚を使って脚やひざに



【サムスプリントの強度アップ方法】



長さに沿って湾曲させるとスプリントは強くなる。

外側の端を反対に向けて曲げると更に強化される。

サムスプリントを二重にしたり、T字型に曲げると更に強くなる。

【使用上の注意】

- 使用前に使用方法を熟読し、装着トレーニングを行い、熟知した上で使用すること。
- 装着部位に悪影響があると思われる場合は、直ちに使用を中止すること。
- サムスプリントはアルミ合金の両面にウレタンフォームを貼り合わせてあるので、ハサミで好みの長さにカットする場合、カット面にアルミ合金の端がでて、手指をさすづけることがあり得る。危険なので、カットした場合は右の図のように折り曲げて、使用するか又はテープ等でカット面を覆って使用のこと。
- 再使用する場合は使用直後に中性洗剤で手洗いし、良く乾燥させて、保管すること。
- 製品は繰り返し使用が可能であるが、消耗品の要素があるので、使用上劣化が激しいと思われるときは当該品の使用を取りやめ、新品と取り替えること。
- 上記5. により使用を止めた製品は不燃性ごみとして処理すること。



【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

- 水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 再使用可能であるが、上記【使用上の注意】5項に準ずる。

【包装】

SAM1121	サムスプリント	スタンダード	1個単位
SAM1410	サムスプリント	ジュニア	1個単位
SAM1191	サムスプリント	ラージ	1個単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者：サムメディカルプロダクツ社
SAM MEDICAL PRODUCTS
(アメリカ・オレゴン州)