

医05 副木
一般医療機器 手・指用副木 16210000
サムスプリント フィンガー


【禁忌・禁止】

【効能・効果・使用目的】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- ・中側： アルミ合金
- ・両外側： ウレタンフォーム貼り
- ・未滅菌

SAM1213 サムスプリント フィンガー
サイズ:約50x108x5mm(5g)

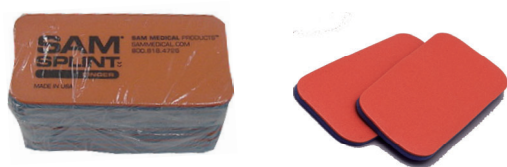


【使用目的又は効果】

損傷した指、又は手の固定に使用する

【使用方法】

指への固定法

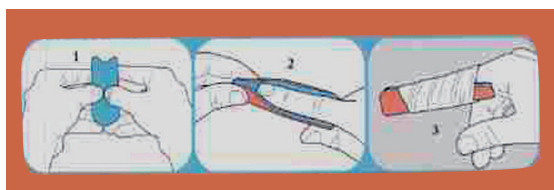

【使用上の注意】

1. 使用前に使用方法を熟読し、装着トレーニングを行い、熟知した上で使用すること。
2. 装着部位に悪影響があると思われる場合は、直ちに使用を中止すること。
3. 再使用する場合は使用直後に中性洗剤で手洗いし、良く乾燥させて、保管すること。
4. 製品は繰り返し使用が可能であるが、消耗品的要素があるので、使用上劣化が激しいと思われるときは当該品の使用を取りやめ、新品と取り替えること。
5. 上記4. により使用を止めた製品は不燃性ごみとして処理すること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所をさけて保管すること。
3. 再使用可能であるが、上記【使用上の注意】5項に準ずる。

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【包装】

10枚/包み

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者：サムメディカルプロダクツ社
SAM MEDICAL PRODUCTS
(アメリカ・オレゴン州)