

医05 副木 36204000  
一般医療機器 成型型副木

## サムスリング-II (骨盤固定スリング)

### 【禁忌・禁止】

以下の場合には使用しないこと。

- ・ 腰部に当てぬこと。
- ・ その他、医師が不相当と判断した場合

### 【形状・構造及び原理等】

パッド、スリング部  
柔らかく浸透性の  
高いトリコット



背面には移動を容易にする低摩擦スライダ

フリーハンドル部  
(ポリエステル)  
複数回使用可能な  
高耐久性

オートストップバックル  
(アセタールプラスチック)  
診察を容易にするために巾が狭くなっている。



品番	スリング 全体長さ	パッド面	重量
SAM4121	約 1350mm	180(縦)x270(横)mm	約 244g
SAM4122	約 1460mm	180(縦)x270(横)mm	約 250g
SAM4123	約 1580mm	180(縦)x270(横)mm	約 260g


### 【使用目的又は効果】

損傷した、或いは損傷の疑いのある  
骨盤を固定すること。


適正ニュートン値でオートストップ

品番	対応臀部 サイズ	ニュートン値
SAM4121	686-1143mm	150N
SAM4122	813-1270mm	150N
SAM4123	915-1371mm	150N

### 【使用方法】

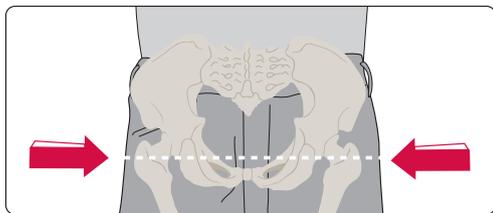

正しい装着位置は大転子

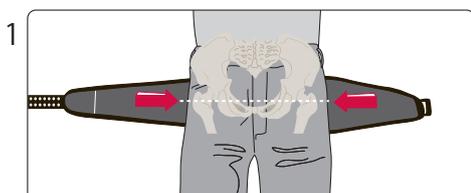


患者のパンツのポケットを空にしたり、臀部周辺に何も異物がないことを確認する。  
スリングの白い面を上にして患者の大転子(臀部)の下に差し込む。

2



黒のストラップをバックルに通し、  
ストラップを引く。

3

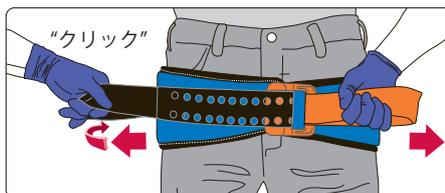

オレンジのストラップを掴み、黒のストラップを反対側に水平に「カッチ」とクリック音が聞こえるまで引っ張る。  
(二人同時に両方から引っ張るのが望ましい。)  
そのままの状態、黒のストラップをサムスリングの表面にしっかりと押しつける。

### 【MRI検査時の注意】

1. MRI検査時には必ず装着したまま検査すること。
2. 検査の前後にスリングを外して、そのまま放置しないこと。
3. スリングを外す時は医師の指示に従ってゆっくりと外すこと。

### 【その他の注意】

- ・ 汚れた場合は冷水で洗たく機での洗濯が出来る。  
(洗濯アミの使用を推奨。)
- ・ 温水、漂白剤等は使用しないこと。
- ・ 洗濯後は完全に乾燥させてから使用すること。
- ・ 高圧蒸気滅菌器は使用しないこと。
- ・ スリングは繰り返し使用できるが、消耗品的要素があるので、外見上汚れがひどかったり、使用上劣化がひどいと思われる場合は新品と交換すること。

### 【包装】 1個単位

### 【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社  
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F  
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者：サムメディカルプロダクツ社  
SAM MEDICAL PRODUCTS  
(アメリカ・オレゴン州)