

医04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 3486400
SAMチェストシールスタンダード

【禁忌・禁止】
再使用禁止

6. チェストシールを取り外す時は、医師の指導あるいは管理下で行う。

【形状・構造及び原理等】

パッケージ：パウチパック 約15.9cm x 25.4cm

内容物：
1. チェストシール 2枚
2. 不織布 1枚

チェストシール：表面（ポリウレタン）
裏面（ハイドロジェル）
ライナー（ポリエステル）

チェストシール：約23.4cm x 19.3cm



不織布
約12.7cm x 22.9cm

【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は直ちに使用すること。
3. 本品は単回使用であり再使用しないこと。
4. 肌に湿疹、かゆみ等の異常が表れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
5. 本品は医師、もしくは十分にトレーニングを受けた者が使用すること。
6. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。

【包装】1個単位

【保管方法及び有効期間等】

- ・常温・常湿で保管すること
- ・有効期間はパッケージ又は被包に表示

【主要文献及び請求先】

請求先：アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者：サムメディカルプロダクツ社
SAM MEDICAL PRODUCTS
(アメリカ・オレゴン州)

【使用目的又は効果】

- ・身体の一部に用いる、接着剤を付した布製またはプラスチック製の各種形状の絆創膏材をいう。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の一部の支持等に用いる。
- ・本品は軍・軍関係機関及び救急医療において、深部銃創・切傷に対応し、創傷の救急閉塞に用いる。

【使用方法等】

1. パッケージを開け、チェストシール2枚とクリーニングパッドを取り出す。
2. クリーニングパッドで創傷部の汚れを拭き取る。
3. チェストシール両端にあるタブを持ち、透明なライナーを剥がす。
4. チェストシールの接着面を下にして、傷口を中心に貼る。
5. チェストシールをしっかりと押し完全に閉塞させる。