

SAM Chest Sealバルブ2.0

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッケージ：パウチパック 約15.9cm x 25.4cm
重 さ：約 52 g

チェストシール：約23.4cm x 19.3cm
バルブ 高さ：約 1.5cm



【原材料】

チェストシール 表 面：ポリウレタン
バルブ：ポリウレタン
裏 面：ハイドロジェル
ライナー：ポリエステル

【使用目的又は効果】

- ・傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
- ・胸部の深部銃創、切傷、刺傷に対応し、創傷を閉塞する。
- ・バルブは一方弁で、身体内の空気を外部へ排気し、外部からは入れない。

【使用方法等】

1. 創傷の汚れをきれいにする。
2. パッケージを開け、チェストシールを取り出す。
3. タブを持ち、透明なライナーを剥がす。
4. チェストシールの接着面を下にして、創傷を中心に貼る。
5. 確実に閉塞するよう、チェストシールを上からしっかり押さえる。
6. チェストシールを剥がすときは医師の指導または監視下で行う。

【使用上の注意】

- ・包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
- ・本品は医師もしくは十分なトレーニングを受けた者が使用すること。
- ・包装に使用期限の表示がないもの、使用期限後のものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光および高温多湿を避け、水漏れに注意し室温にて保管
- ・有効期限：パッケージに表示

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者：サムメディカルプロダクツ社
SAM MEDICAL PRODUCTS
(アメリカ・オレゴン州)