

医04 整形用品
一般医療機器 熱傷用ラップ 36093000

WJドレッシング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

製品名	ミリタリー10x10	ミリタリー10x40
製品番号	WJDM0010	WJDM0030
サイズ	10x10cm	10x40cm
重さ	45g	90g
		
製品名	ミリタリー20x45	ミリタリー28x49
製品番号	WJDM0050	WJDM0070
サイズ	20x45cm	28x49cm
重さ	340g	420g
		

*1

- ・ 熱伝導の作用により熱傷の熱を下げる。


【原材料】

- ・ 主成分：純水
- ・ 成分：不織布
キサンタンガム
グリセリン
ヒアルロン酸

【使用目的又は効果】

- ・ 熱傷部の熱を下げる。
- ・ 熱傷の拡大を防止する。
- ・ 熱傷の痛みを和らげる。
- ・ 熱傷部の湿潤を保つ。
- ・ 感染を防止する。

【使用方法等】

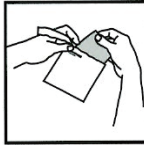


熱傷のサイズに応じたドレッシングを選ぶ。
(TBSA マークに成人 / 子供別に適用範囲%が
表示されている。)

パウチを開き、ドレッシングを取り出す。




ドレッシングを拡げ、すぐに熱傷部分にあてる。
パウチに残ったジェルをドレッシングや熱傷の付
着した衣類の上に注ぐ。

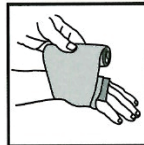

ドレッシングをそのまま置いておく。ウォー
タージェルのドレッシングは一旦患部に適用し
たらそれ以上にもしなくて良い。

処置時に水を加えないこと。

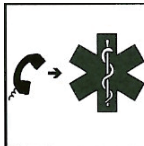

ドレッシング適用後は出来るだけ早く、
専門医の診察を受けること。

ドレッシングを除去するには水で洗い流す。

【使用上の注意】

- ・ 化学物質による熱傷にはウォータージェルを使用前に
該当の化学物質を予め除去しておくことが望ましい。
- ・ 水反応性化学物質には適用しないこと。
- ・ 通電している電気機器に接触している傷病者には
適用しないこと。
- ・ パウチが開いていたり損傷していたら使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
- ・ 有効期間：パッケージに表示

【包装】1個単位

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者：ウォータージェル テクノロジー社
Water-Jel Technologies, LLC
(アメリカ・ノースカロライナ州)