

器12 理学診療用器具  
一般医療機器 冷却パック 37240020

# ポーラスキン・キット

## 禁忌・禁止

【使用目的又は効果】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。

## 【形状・構造及び原理】

### アイスシート



#### サイズ・重さ

スタンダード：約 91.4 x 76.2cm  
約 272g

ラージ：約 91.4 x 152.4cm  
約 676g

### アイスパック



#### サイズ・重さ

約 38.1 x 27.9 x 3.8cm  
約 521.6g

### フォイルパウチ



#### サイズ・重さ

約 27.9 x 25.4 x 10.7cm  
約 3.78kg

### クーラー



#### サイズ・重さ

約 35.6 x 30.5 x 17.8cm  
約 544g

4. フォイルパウチからアイスパックが4個入ったパウチを取り出し、切れ目から裂いてアイスパックを取り出す。  
アイスパックを傷病者の、脇の下、大腿部の内側の高い位置へそれぞれ当てる。
5. アイスシートが3枚入ったフォイルパウチから、1枚取り出す。  
アイスシートを拡げ、傷病者の頸部から、胴体・腕を覆う。  
対流冷却を促進させるため、風を送り続ける。
6. 1分間隔で、アイスシートを取り換える。  
取り替えたアイスシートは、氷水の入ったクーラーへ入れる。
7. 6枚使い終わったら、クーラーからアイスシートを2枚取り出し、上半身と下半身を覆う。
8. 傷病者への送風を続ける。
9. 救急隊が到着するまで、傷病者の観察と手当を続ける。

## 【使用上の注意】

本品は使用法のトレーニングを実施した上で、使用してください。

## 【保管方法及び有効期間】

- ・ 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

## 【原材料】

- ・ ナイロン不織布
- ・ 吸水性ポリマー

## 【使用目的又は効果】

熱中症の疑いのある傷病者の深部体温を下げるために使用する。

## 【使用方法】

使用前に、冷蔵庫・冷凍庫または氷の入ったクーラーボックスで冷やす。

1. 傷病者を、可能であれば、熱源(熱い舗装、日光など)から、安全な場所へ移動する。
2. 傷病者の衣服をできるだけ、取り除く。
3. 傷病者を手当するため、地面、ストレッチャーなどに横たわせる。

## 【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社  
〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-14-5 3F  
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者：ノースアメリカンレスキュー社  
North American Rescue, LLC.  
(アメリカ・サウスカロライナ州)