

器49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器  
一般医療機器 ガイド 37150000

# SAM ソーラサイト

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

小児・新生児には使用しない

## 【形状・構造及び原理】

除去用ミシン目



位置合せ矢印

腋窩フック



- 胸腔穿刺または胸腔ドレナージの適切な位置を、片側を腋窩に固定し、片側を腸骨稜の前方へ向けることにより示す。

## 【使用目的】

胸腔穿刺や胸腔ドレナージの適切な位置を特定するために使用する。

## 【使用方法】



腋窩に完全に挿入されるまで腋窩フックを脇の下へ押し付ける。  
注：腕の位置を傷病者の側から 90° 未満に保つ。



位置合せ矢印を腰に向け、腸骨稜の前方に合わせる。  
注：器具は傷病者の脊椎と平行にする。



セーフゾーンウィンドウ内で、肋間を触診する。  
注：セーフゾーンウィンドウ内で2つの肋間が確認された場合は上部の肋間を選択する。



セーフゾーンウィンドウ内で確認した肋間で穿刺し排気・排液する。  
注：肋骨を触診できない場合は、セーフゾーンウィンドウの中央で排気・排液する。肋骨に当たった場合は、肋骨の上部へ針を向ける。

- ⑤ 使用後、他の器具や手技に干渉しないよう、ミシン目より切り開き、除去する。

## 【使用上の注意】

- 小児・新生児用ではない。
- 気胸・血胸および胸腔穿刺を必要とする傷病者を処置する時に、標準的な処置に従い、訓練を受けた専門家が使用する。

## 【保管方法及び有効期間】

直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

## 【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社  
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F  
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者：サムメディカルプロダクツ社  
SAM MEDICAL PRODUCTS  
(アメリカ・オレゴン州)

使用説明書を必ずお読みください。