

器55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄剤注入用具 70463000

デリバリーセット

再使用禁止

禁忌・禁止
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】



全長：122cm
重さ：23g

原理

モーガンレンズ・輸液ボトルに接続し、洗浄液を流す。

【使用上の注意】

1. 本製品は眼洗浄の訓練を受けた専門家のみが使用すること。
2. 本製品の再使用や再滅菌はしないこと。
3. パッケージが開封または破損している場合は使用しないこと。
4. 使用後は、感染性廃棄物として廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
- ・ 有効期限:パッケージに表示

【使用目的又は効果】

眼に洗浄剤を注入するときに使用する。

【主要文献及び文献請求先】

請求先: アコードインターナショナル株式会社

【使用方法】

1. 必要に応じて事前に点眼麻酔を行う。
2. モーガンレンズにデリバリーセットを接続する。
3. 適切な洗浄液を使用し、最小限の流量になるように調節する。
4. 傷病者に下方向を見てもらい、上まぶたを軽く持ち上げレンズを目の上部に挿入する。
5. 次に上方向を見てもらい、下まぶたを引いてレンズを完全に挿入する。
6. 適切な流量に調節して洗浄を開始する。
7. 取り外しは、洗浄液は流したまま、傷病者に上方向を見てもらい、下まぶたを引いた状態でレンズをスライドさせるように取り外し、洗浄液を止める。

【製造販売業者の名称及び住所】

製造販売業者:アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736
製造業者:モータン社
Motan, Inc.
(アメリカ・モンタナ州)