

器55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄器キット 11297001

モーガンレンズ眼洗浄システム


再使用禁止

禁忌・禁止

- ・ 再使用禁止
- ・ 眼の穿孔や角膜深部の損傷、眼球に埋没した異物がある場合などには使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、モーガンレンズ、デリバリーセット、メディダクトなどを組み合わせて使用する。

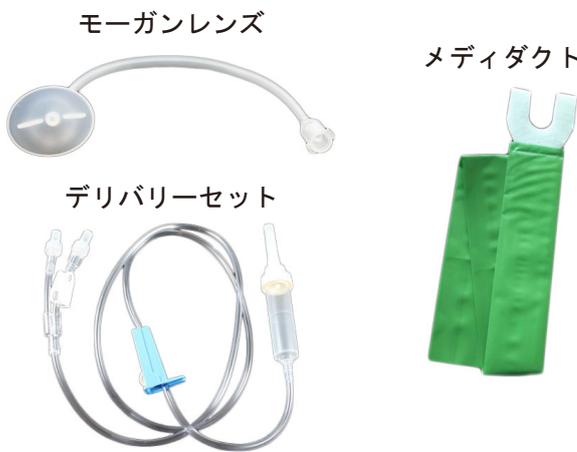

原理

モーガンレンズを眼に装着し、洗浄液を流すことによって、眼を洗浄する。

【使用目的又は効果】

眼の化学熱傷あるいは眼に異物が入った時に、眼を洗浄するために使用する。

【使用方法】

1. 必要に応じて事前に点眼麻酔を行う。
2. モーガンレンズにデリバリーセット（または輸液セットなど）を接続する。
3. 適切な洗浄液を使用し、最小限の流量になるように調節する。
4. 傷病者に下方向を見てもらい、上まぶたを軽く持ち上げレンズを目の上部に挿入する。
5. 次に上方向を見てもらい、下まぶたを引いてレンズを完全に挿入する。
6. 適切な流量に調節して洗浄を開始する。
7. 取り外しは、洗浄液は流したまま、傷病者に上方向を見てもらい、下まぶたを引いた状態でレンズをスライドさせるように取り外し、洗浄液を止める。

【使用上の注意】

1. 本製品は眼洗浄の訓練を受けた専門家のみが使用すること。
2. 本製品の再使用や再滅菌はしないこと。
3. パッケージが開封または破損している場合は使用しないこと。
4. 使用後は、感染性廃棄物として廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
- ・ 有効期限：パッケージに表示

【主要文献及び文献請求先】

請求先： アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者の名称及び住所】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736
製造業者：モータン社
Motan, Inc.
(アメリカ・モンタナ州)