

四肢用ターニケット 適正張力でストラップをロック、ロッドによる最小の締め付けで止血



SAMXT-M
ブラック 軍用

**CLICK クリック
TWIST 回す
SECURE 確実に止血**



ターニケット失敗の主な原因は、“緩み”です。
SAM ターニケット XT の TRUFORCE[™]バックルは、適正張力に達するとバックル内のロックピンが作動し、ストラップを固定します。止血を確認するまでロッドを回し、ロッドクリップで固定します。



SAMXT-B
ブルー 練習用



SAMXT-C
オレンジ 救急用

+ アルミ製ロッド



軽量で、丈夫な
アルミ製ロッド

+ TRUFORCEバックル



適正張力に達すると
ロックピンが飛び出し
ストラップを固定

+ TRUFLEX プレート



プラスチック製の柔軟な
プレートは、四肢に効果的な
圧力を加える

+ TIMEバンド



止血開始時間を
記録

製品名	SAM ターニケット XT		
製品番号	SAMXT-M (ブラック)	SAMXT-C (オレンジ)	SAMXT-B (ブルー)
サイズ	L900 x W38mm		
パッケージ	L165 x W60 x D38mm		
重さ	約 108g		
適用範囲	139 - 889mm		
原材料	ストラップ：ナイロン、バックル・プレート：プラスチック、ロッド：アルミニウム		

製造販売届出番号：13B3X00138000058

+ 使用方法・動画

YouTube

SAM ターニケット XT 上肢 / 下肢



耐久性は米国国防総省の調達基準 MIL-STD810G 規格を満たす



SAM ターニケット XT ポリマー製ロッド



SAMXT-C700
オレンジ 救急用



SAMXT-M700
ブラック 軍用



SAMXT-B700
ブルー 練習用

製造業者
SAM[®] MEDICAL
サムメディカルプロダクツ社
(米国・オレゴン州)

製造販売業者
ACCORD INTERNATIONAL INC.
アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736
www.accord-intl.com
製造販売業許可番号:13B3X00138