

四肢用ターニケット 片手で迅速に装着できる小型・軽量の止血帯。米軍ファーストエイドキットの標準品




第7世代 CAT 改良点と特長

- 1 バックル
バンドを緩みなくしっかり固定
- 2 レッドチップ
NAR の特長的な意匠であるレッドチップは、視認性に優れバックルに挿入しやすいデザイン
- 3 バンド
バンドに内蔵した移動式のストラップが伸縮し均等に圧力をかける
- 4 ロッド
太くより強く
- 5 ロッドクリップ
ロッドの強化に伴いより強固に
- 6 TIME ストラップ
文字の視認性が向上




NAR3001
ブラック 軍用

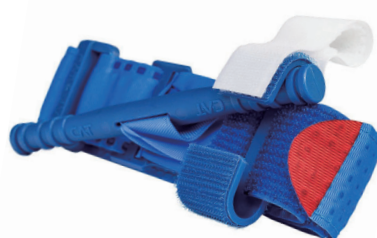

NAR3033
ブルー 練習用

使用方法

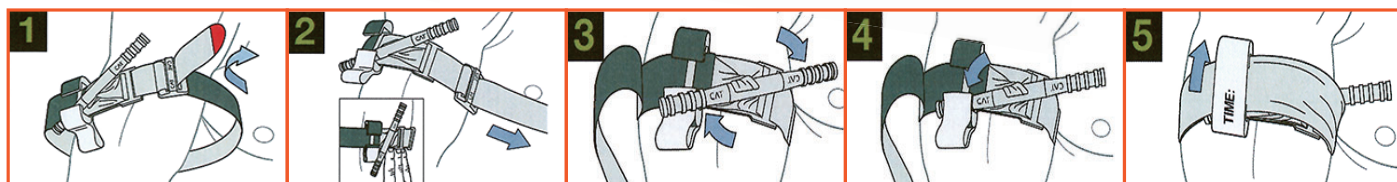

1 バックルにレッドチップを通す

2 ベルトを強く引きベルクロで固定

3 止血するまでロッドを回す

4 ロッドをロッドクリップで固定

5 ベルトをロッドクリップに通しロッドを覆う
止血開始時間を記録

製品名	NAR ターニケット C-A-T		
製品番号	NAR3001(ブラック)	NAR3023(オレンジ)	NAR3033(ブルー)
サイズ	L952mm xW38mm		
収納時	L165mm x W60mm x D38mm		
重さ	約 80g		

製造販売届出番号：13B3X00138000059



使用方法・動画

YouTube

NAR ターニケット C-A-T
上肢装着 / 下肢装着



米国軍での実際の使用データ：イラク・アフガニスタン戦争において、第 75 レンジャー連隊で 419 名の負傷者が発生した。(2001 年～2010 年 3 月まで)そのうちの 89 名にターニケットが使用された。89 名のうち 95%の負傷者は、生け残りの治療レベルに到達した。最終的には、94%が生き延びた。