


四肢用ターニケット 片手で迅速に装着できる小型・軽量の止血帯。米軍ファーストエイドキットの標準品

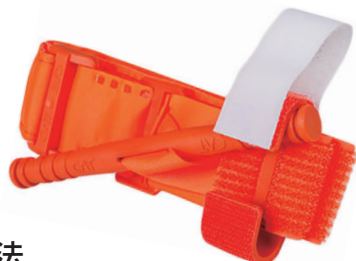


第7世代 CAT 改良点と特長

- 1 バックル
バンドを緩みなくしっかり固定
- 2 レッドチップ
NAR の特長的な意匠であるレッドチップは、視認性に優れバックルに挿入しやすいデザイン
- 3 バンド
バンドに内蔵した移動式のストラップが伸縮し均等に圧力かける
- 4 ロッド
太くより強く
- 5 ロッドクリップ
ロッドの強化に伴いより強固に
- 6 TIME ストラップ
文字の視認性が向上



使用方法

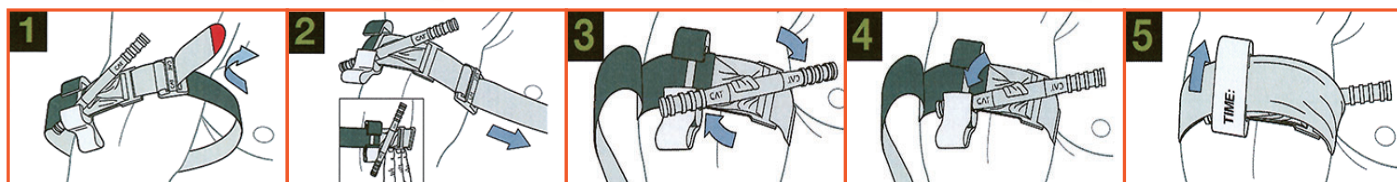

1 バックルにレッドチップを通す

2 ベルトを強く引きベルクロで固定

3 止血するまでロッドを回す

4 ロッドをロッドクリップで固定

5 ベルトをロッドクリップに通しロッドを覆う
止血開始時間を記録

製品名	NAR ターニケット C-A-T		
製品番号	NAR3001(ブラック)	NAR3023(オレンジ)	NAR3033(ブルー)
サイズ	L952mm xW38mm		
収納時	L165mm x W60mm x D38mm		
重さ	約 80g		
製造販売届出番号	13B3X00138000059		



使用方法・動画



NAR ターニケット C-A-T
上肢装着 / 下肢装着



米国軍での実際の使用データ：イラク・アフガニスタン戦争において、第 75 レンジャー連隊で 419 名の負傷者が発生した。(2001 年～2010 年 3 月まで)そのうちの 89 名にターニケットが使用された。89 名のうち 95%の負傷者は、生け残りの治療レベルに到達した。最終的には、94%が生き延びた。