



チェストシール chest seal

SAM[®] MEDICAL SAM チェストシール



胸部開放創の閉塞シール 胸部の開放創は、開放性気胸を防ぐためにできるだけ早く閉塞させ、胸腔への空気の流入を防ぐことが重要です。一方向バルブにより、胸腔の空気を排気し、胸腔への空気の流入を防ぎます。



+ 一方向バルブ

4方向に排気口が設けられたドーム型のバルブは、傷病者の体位に関係なく、胸腔の空気を排気します。また、血栓や軟組織による内部閉塞を防ぎます。バルブは強固なポリウレタン製で、重い防弾チョッキが覆っても正常に機能します。



+ 素早い装着、大きな創傷に対応

シール両端の機能的なタブにより、グローブをしたまま容易に剥離フィルムを剥がし、素早く貼ることができます。楕円形のシールは装着面積が広く、大きな創傷に対応します。

+ 強力な粘着

装着の前に創傷部位の汚れをガーゼ等で拭き取ります。ハイドロゲルの動きにより、シールは皮膚に強力に粘着し水中でも剥がれません。



+ 高い伸縮性と透過性

伸縮性に優れたシールは透明で、創傷部位の観察が容易です。



+ 夜間の視認性

暗視装置を通してシールの確認が可能です。

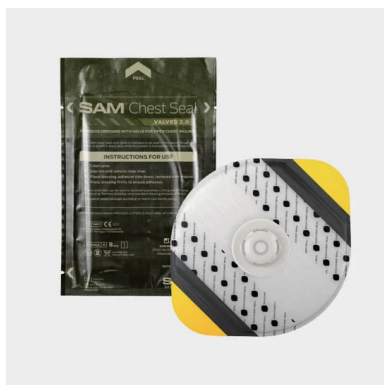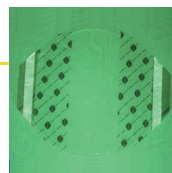

SAM チェストシール バルブ 2.0 (1 枚)

胸部開放創の閉塞に使用します。4 方向に排気口が設けられたドーム型のバルブが、胸腔の空気を排気し、胸腔への空気の流入を防ぎます。

製品番号	SAM62013
製品名	SAM チェストシールバルブ 2.0 (1 枚)
サイズ	234×193×16mm
パッケージ	159×254×16mm
重さ	52g

製造販売届出番号: 13B3X00138000052




SAM チェストシール スタンダード (2 枚)

胸部開放創の閉塞に使用します。バルブのない製品です。楕円形のシールは装着面積が広く、大きな創傷に対応します。

*拭き取りガーゼ付

製品番号	SAM62011
製品名	SAM チェストシールスタンダード (2 枚)
サイズ	234×193×1mm
パッケージ	159×254×6mm
重さ	90.7g

製造販売届出番号: 13B3X00138000022

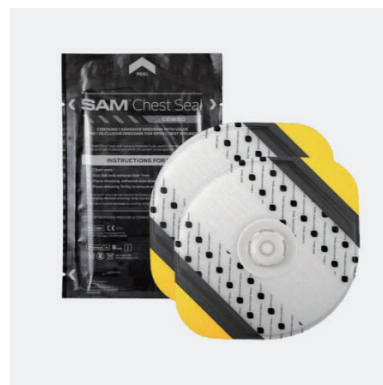

SAM チェストシール コンボ (2 枚)

バルブ付とバルブ無し製品のセットです。

製品番号	SAM62014
製品名	SAM チェストシールコンボ (2 枚)
構成	バルブ付・無し 各 1 枚
サイズ	234×193×16mm 234×193×1mm
パッケージ	159×254×19mm
重さ	89g

製造販売届出番号: 13B3X00138000053



使用方法・動画



製品説明・使用方法



アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736

www.accord-intl.com

製造販売業許可番号: 13B3X00138