



骨盤固定ベルト サムスリングII pelvic sling II

SAM[®]
MEDICAL

骨盤固定ベルト サムスリングII

X-RAY



骨盤整復固定具

骨盤損傷による出血は、生命の危険に関わります。サムスリングは骨盤を素早く整復固定します。

簡単装着：1分以内に装着

適切なニュートン値に達するとストラップは停止
最適な圧力で骨盤を固定して、過剰な締め付けを防止
サムスリングだけの特徴です。

X線/CT/MRIに対応

ストラップとスリングの
ベルクロは素早くしっかりと密着

低摩擦により傷病者の臀部下へ
容易に滑り込ませることが可能

スリングには丈夫な素材を採用
通常の洗浄で繰り返し使用可能

前方部分が幅狭のため、尿道カテーテルや
IVR、創外固定治療を受ける場合にも妨げに
ならない



受傷者のパンツのポケットを空にし、臀部周辺
に何も無いことを確認する。
サムスリングの黒い面を上にして受傷者の大転子
(臀部)の下に滑り込ませる。



黒のストラップをバックルに通し、ストラップ
を引く。



オレンジのストラップをつかみ、黒のストラップ
を反対側に水平に「カチッ」とクリック音が
聞こえるまで引っ張る。そのままの状態、黒
のストラップをサムスリングの表面にしっかりと
押し付ける。

製品番号	SAM4121	SAM4122	SAM4123
製品名	SAM スリングII スモール	SAM スリングII スタンダード	SAM スリングII ラージ
スリングサイズ	約 1350mm	約 1460mm	約 1580mm
(パッド面)	L270 × W180mm	L270 × W180mm	L270 × W180mm
対応臀部サイズ	686-1143mm	813-1270mm	915-1371mm
重さ	約 244g	約 250g	約 260g
ニュートン値	150N		
素材	パッド、スリング部 (トリコット) ハンドル部 (ポリエステル) バックル (アセタールプラスチック)		

製造販売届出番号: 13B3X00138000020

使用方法・動画



サムスリングII使用方法 / よくある質問



製造販売業者
ACCORD
INTERNATIONAL INC.

アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F

TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736

www.accord-intl.com

製造販売業許可番号: 13B3X00138

製造業者
SAM[®]
MEDICAL
サムメディカルプロダクツ社
(米国・オレゴン州)