






SAM[®] MEDICAL SAM ソーラサイト

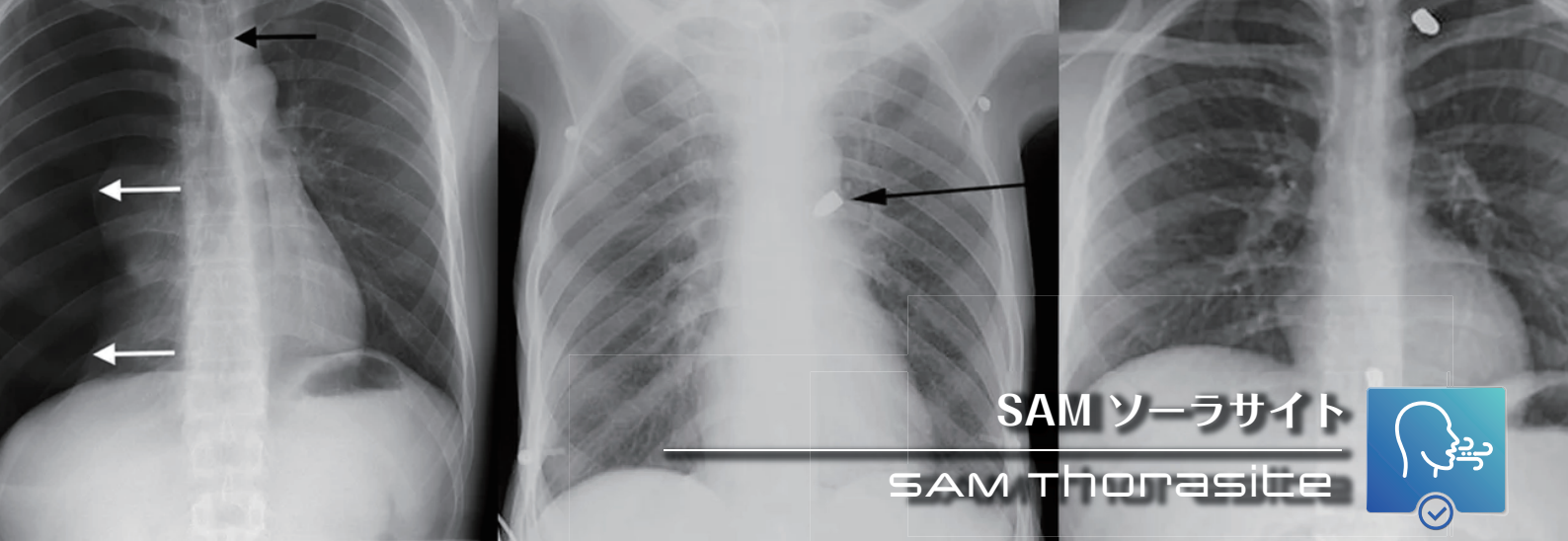

側部胸腔穿刺ガイド 側部より胸腔穿刺や胸腔ドレナージを行う際、適切な穿刺位置を素早く特定します。

+ SAMソーラサイトの特徴

- 解剖学的ランドマークガイドにより、胸腔穿刺位置を短時間にピンポイントで特定します。
- 胸腔へのアプローチが安全に行えます。
- 傷病者の左右両側に使用可能です。
- ソーラサイトは無滅菌で単回使用製品です。

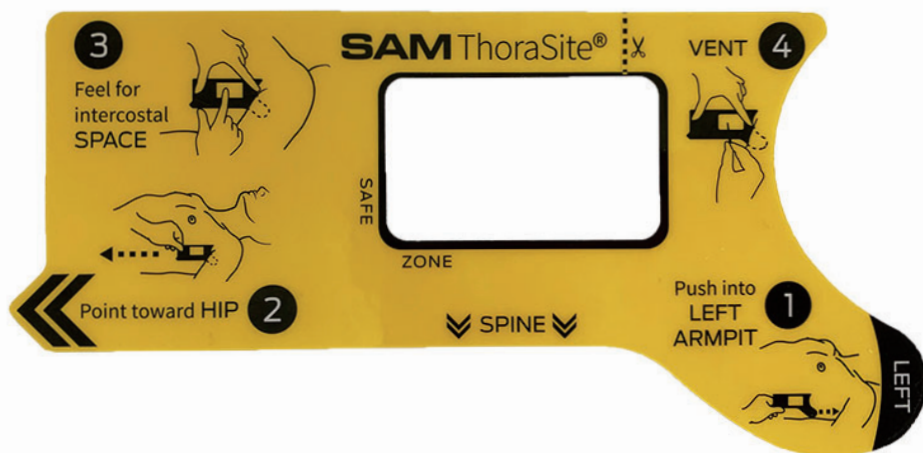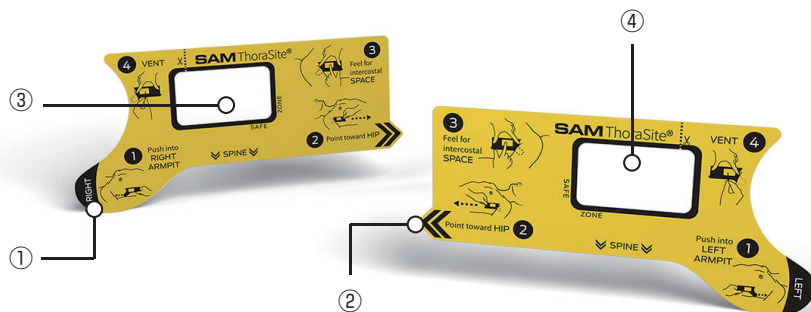

① 腋窩フック

前腋窩線（AAL）と中腋窩線（MAL）の正確な位置合わせのために、丸いフック部分を腋窩に挿入します。

② 位置合せ矢印

前腸骨稜 / 臀部の高さに合わせます。

③ セーフゾーンウィンドウ

窓内に適切な処置部位を示します。

④ 穿刺

胸腔穿刺部位を確認して処置を行います。

製品番号	SAM2105(5 枚入り)、SAM2125(25 枚入り)
製品名	SAM ソーラサイト
サイズ	L141x W68.7x D1mm
重さ	5g/枚
原材料	紙・ポリエステル(ラミネート)

製造販売届出番号：13B3X00138000068

米国特許取得済み：10,595,898

+ 使用方法・動画



SAM ソーラサイト使用方法



アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F

TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736

www.accord-intl.com

製造販売業許可番号：13B3X00138

