



Hema-ターニケット

弾性スリーブ ターニケット 腕脚用

Hema-T™は、伸縮性に優れた弾性スリーブによる効果的な圧迫により、腕や脚の開放創からの出血を、迅速に止血することを目的として開発されたターニケットです。

Hema-T™は、装着が容易で、予備知識は必要ありません。(図1)

Hema-T™を脚に装着する場合、靴を脱ぐ必要はありますが、ズボンを脱ぐ必要はありません。
腕に装着する場合、袖をまくり上げる必要はありません。(図2)

腕や脚を骨折した場合などは、補助が2人必要です。1人がハンドルを持って軸方向に牽引を行い、もう1人がもう一方のハンドルを牽引して **Hema-T™**を装着します。

パッケージには、適用時間を記入するための黄色いシールが入っています。傷病者の額あるいは適切な箇所に貼ってください。(図3)

Hema-T™は、腕や脚に最長2時間留置することができます。より長い時間止血が必要な場合は、出血部位を直接手で圧迫しながら **Hema-T™**を取り外し、10分後に再び **Hema-T™**を出血部位に装着してください。(図4)

***Hema-T™**の脱着は医師の指示に従って行ってください。

図 1



図 2



図 3



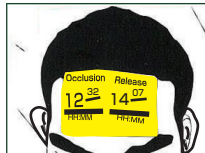


図 4

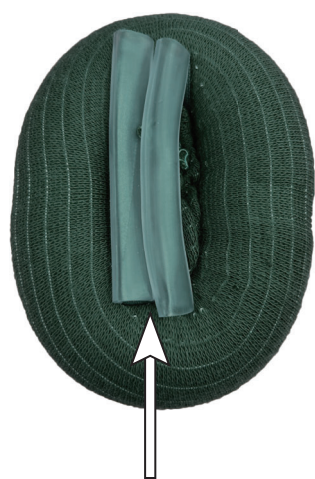

ハンドル

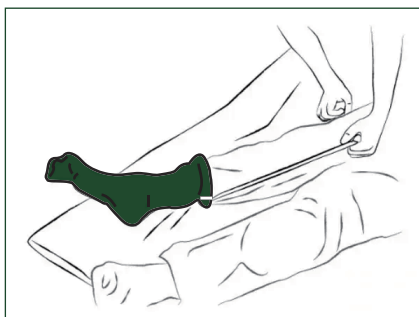

製品仕様

製品名	Hema-T
製品番号	OHK-HT
カラー	グリーン
収縮期血圧 上限	<180 mm Hg
全長	<1200mm
適用最小周径	300 mm
適用最大周径	850 mm
腕圧迫範囲	208 - 287 mmHg
脚圧迫範囲	234 - 383 mmHg
パッケージ	3層バキューム包装

製造販売届出番号: 13B3X00138000086

製造業者
Oneg HaKarmel Ltd.
イスラエル



アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736
www.accord-intl.com