


各部名称

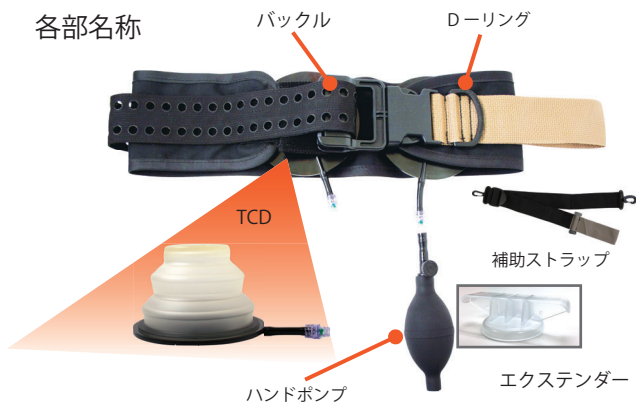

製品番号	SAMJT102	
製品名	SAM ジャンクショナル ターニケット	
構成	サイズ	材質
ベルト / バックル	10x142cm	コーデュラ、ナイロンウェビング ポリアセタール
T C D 2個	径 11 x 高 2cm	ポリウレタン、ポリカーボネート
エクステンダー 1個	10 x 5x 3cm	ポリカーボネート
ハンドポンプ 1個	径 5 x 高 13cm	非フタル酸ポリ塩化ビニル
補助ストラップ 1個	5x 92cm	ナイロンウェビング
重量	590g	



注：仕様・サイズは予告なく変わることがあります。

取扱説明書



アコードインターナショナル株式会社

TCD(Target Compression Device)とハンドポンプの操作方法

TCD
(Target Compression Device)

ハンドポンプ

ハンドポンプの操作



空気を送るときはダイヤルを右へ止まるまで回す。
空気を抜くときは、左へ回す。



ハンドポンプを押して空気を送る。

膨らませる(圧迫を加える)



1. ハンドポンプをTCDへ取り付け。



3. ポンプを数回押し、TCDを膨らませる。



2. ダイヤルを右へ止まるまで回す。



4. ポンプをTCDから取り外しても空気は抜けない。


空気を抜く(圧迫をやめる)



1. ハンドポンプをTCDへ取り付け。



3. 空気が抜ける。

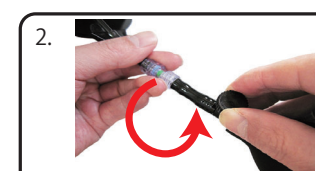


2. ダイヤルを左へ回す。




SAMジャンクショナルターニケットの詳細・
使用法・日本語ビデオは右のQRコード
または下記ページより
ご覧頂けます。

<http://www.accord-intl.com/products/military/shiketu/samjt102.html>


鼠蹊部での止血

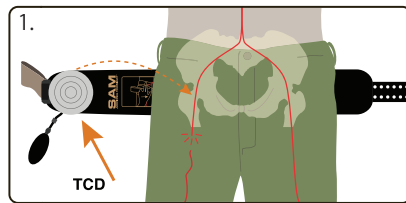


ベルトを受傷者の下部へスライドさせ、圧迫部位にTCDを配置させる。創傷に直接当たるときは、キトサム100(止血包帯材)または滅菌ガーゼで被覆する。両側を止血するときはTCD x 2を用いる。

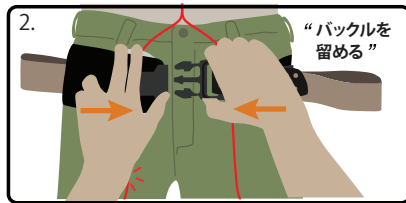

TCDを配置させた状態でベルトのバックルを留める。

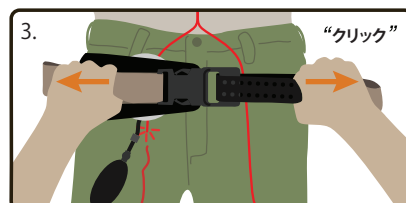


"クリック"音がするまでブラウンハンドルを両側へ水平に引く。"クリック"音がしたらベルトをベルクロに押し付けしっかり固定する。ベルトを固定する時にもう一度クリック音がある場合がある。

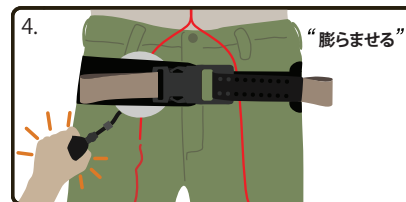


止血するまでポンプでTCDを膨らませる。搬送中は常に受傷者をモニターし必要に応じてSJTを調整あるいは取り外す。

骨盤骨折の固定

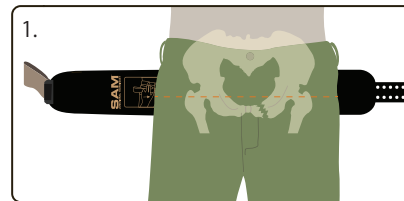

受傷者のパンツのポケットを空にし、臀部周辺に何も無いことを確認する。TCDを装着しないで受傷者の大転子(臀部)の下へベルトをスライドさせる。

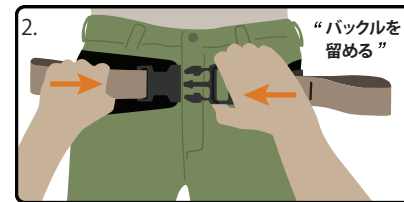


ベルトのバックルを留める。




"クリック"音がするまでブラウンハンドルを両側へ水平に引く。"クリック"音がしたらベルトをベルクロに押し付けしっかり固定する。ベルトを固定する時にもう一度クリック音がある場合がある。


腋窩前での止血

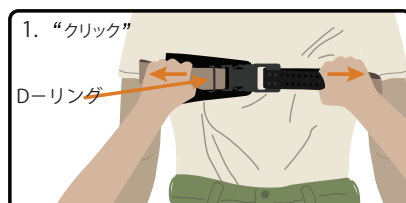


SJTを受傷者の両腋窩の出来るだけ高位置に当てる。Dリングを創傷側のネック側面のラインに揃える。バックルを留め、"クリック"音がするまでブラウンハンドル引いてベルトを固定する。

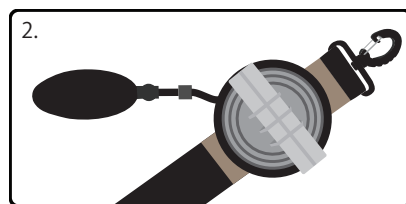


TCDにエクステンダーを取付け、補助ストラップのブラウンベルクロ面に上図のように装着する。

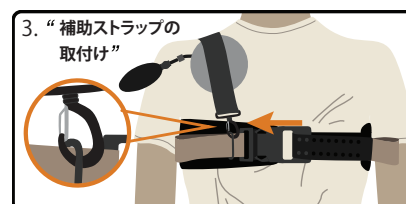

上図のように補助ストラップのクリップ(大)を身体前面のDリングに取付ける。

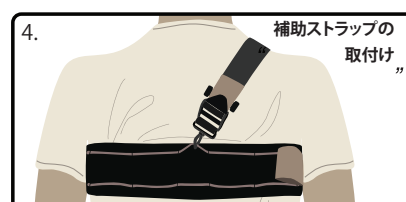

上図のように背面のコードの出来るだけ中央線上に補助ストラップのクリップ(小)を取付ける。

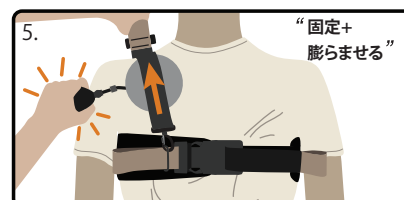

ブラウンハンドルでベルトをしっかり固定し、止血するまでポンプでTCDを膨らませる。搬送中は常に受傷者をモニターし必要に応じてSJTを調整あるいは取り外す。

使用上の注意

- ・ 4時間以上、装着しないこと
- ・ 救命処置施設あるいはそれに準ずる施設でのみ取り外すこと
- ・ 高度変化などで加圧が必要な場合は、ハンドポンプで空気を送ること



SAMジャンクショナルターニケットの詳細・
使用法・日本語ビデオは左のQRコード
または下記ページより
ご覧頂けます。

References:

- 1 James C. Krieg, MD, et al: Emergent Stabilization of Pelvic Ring Injuries by Controlled Circumferential Compression: A Clinical Trial. *Journal of Trauma* 59:659-664, 2005.
- 2 Davis JM, et al: Trauma Research Consortium. Factors associated with mortality in combat-related pelvic fractures. *Surg.* 2012; 20 Suppl 1:S7-12.
- 3 East ridge BJ, et al: the future of combat casualty care. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012 Dec; 73(6 Suppl 5):S431-7.
- 4 Stannard A, Morrison, et al The epidemiology of noncompressible torso hemorrhage in the wars in Iraq and Afghanistan. *J Trauma Acute Care Surg.* 2013 Mar; 74(3):830-4.