


BiLumix

Shadowless HeadLamp

BL-HL2 ヘッドライト「コードレス・拡散光」 取扱説明書

各部の名称

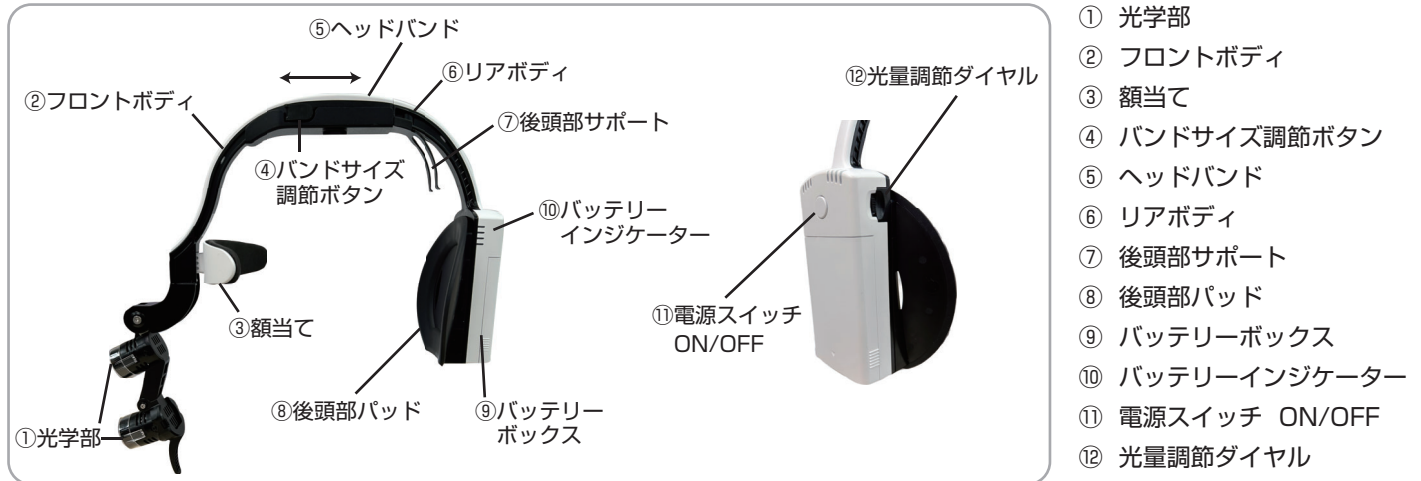

使用方法

1. 装着の前に

ヘッドライトのヘッドバンドは、収縮した状態でキャリングケースに収められています。

装着するには、ヘッドバンドを伸長させてから行う必要があります。左手でフロントボディを持ち、右手の親指と人差し指でヘッドライト上部両側にあるバンドサイズ調節ボタン④を内側に押し込みながら後方に引いて、ヘッドバンド⑤を伸長させてください。



ヘッドライトの装着と脱着は、必ずヘッドバンド⑤を伸長させてから行ってください。

ヘッドバンドが十分に伸びていないと、ジョイント部に負荷がかかり故障の原因となります。

2. ヘッドライトの装着

✓ ヘッドバンド⑤が伸長していることを確認してください。

✓ ヘッドライトを頭に被せ、バンドサイズ調節ボタン④を、親指と人差し指で内側に押し込みながら、リアボディ⑥を前方に押して頭にフィットさせます。

3. ヘッドライトの脱着

✓ 右手の親指と人差し指で、ヘッドライト上部両側にある、バンドサイズ調節ボタン④を内側に押し込みながら後方に引いて、ヘッドバンド⑤を伸長させてください。

4. 光学部の位置調節

✓ リアボディ⑥後部にあるバッテリーボックス⑨の電源スイッチ⑪を押してください。ブルーのインジケーター⑩が点灯します。

✓ 光学部①を下方に移動します。この状態でライトが点灯します。

✓ ヘッドバンドが適切に頭に固定され、光学部①が顔の中心に位置し、ライトが正面を照らしているか確認してください。

✓ 二つの照明光は 30~40cm 先で重なり合います。

✓ 光量を調節するには、バッテリーボックス⑨の右側にある光量調節ダイヤル⑫を回してください。

5. ライトと電源の ON/OFF

✓ ライトの ON/OFF : 電源が ON になっている時に、光学部①を上部に移動させるとライトは消灯し、光学部を下げるとライトは点灯します。

✓ 電源の ON/OFF : バッテリーボックス⑨の電源スイッチ⑪を押すとインジケーター⑩は消え、電源は OFF になります。使用後は必ずこの状態にしてください。

バッテリー充電方法

バッテリーを充電クレードルにセット



充電：赤色のインジケータが点灯
白色のインジケータが点滅
1 2 3 4

充電完了：赤色のインジケータが消灯
白色のインジケータが4つ
点灯

1. バッテリーを充電クレードルにセットします。
2. USB-C 充電ケーブルで充電クレードルと USB-C AC アダプタを接続します。
3. 充電を開始すると赤色の LED が点灯し 4 つの白色 LED が点滅し充電状況を知らせます。
4. 充電が完了すると赤色の LED が消灯して、充電完了を知らせます。
5. 充電後はバッテリーをクレードルから取り外してください。

メンテナンスと保管

清拭

ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルの外装表面を、濃度 70% のアルコールで湿らせた不織布ガーゼ等で清拭してください。



ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルに直接アルコール等を噴霧しないでください。

光学部やヘッドライトの接合部に液体をかけないでください。

ヘッドライト本体や電気コネクタ、充電クレードル、バッテリーに液体が付着しないようにしてください。

メンテナンス

衛生上ヘッドパッドは 4～6 ヶ月ごとに交換することをお勧めします。

保管方法

ヘッドライトは湿気の少ない乾燥した換気の良い安全な場所に保管し、物理的な衝撃や打撃から保護してください。

製品の輸送時や長期保管時には、バッテリーを本体から外してください。

製品仕様

重量：164.5g

明るさ：最大約 100,000LUX (距離 25cm)

バッテリー持続時間：約 3.5 時間 (最大光量)

製品構成

ヘッドライト本体

予備バッテリー

充電クレードル

USB-C 充電ケーブル

USB-C AC アダプタ 20W

六角レンチ

キャリングケース