

BiLumix

Shadowless HeadLamp

BL-HL3S ヘッドライト「携帯バッテリー・スポット光」

取扱説明書

各部の名称



- ① 光学部
- ② フロントボディ
- ③ 額当て
- ④ バンドサイズ調節ボタン
- ⑤ ヘッドバンド
- ⑥ リアボディ
- ⑦ 後頭部サポート
- ⑧ 電源ケーブル
- ⑨ 携帯バッテリー
- ⑩ クレドール
- ⑪ バッテリーインジケーター
- ⑫ 電源スイッチ ON/OFF
- ⑬ 光量調節ダイヤル
- ⑭ ロックボタン

使用方法

1. 装着の前に

- ✓ ヘッドライトの電源ケーブルを USB type ケーブルと接続します。
さらに USB type ケーブルをバッテリーと接続します。
バッテリーをベルトや手術着などに固定してください。
- ✓ ヘッドライトのヘッドバンドは、収縮した状態でキャリングケースに収められています。
装着するには、ヘッドバンドを伸長させてから行う必要があります。左手でフロントボディを持ち、右手の親指と人差し指でヘッドライト上部両側にあるバンドサイズ調節ボタン④を内側に押し込みながら後方に引いて、ヘッドバンド⑤を伸長させてください。

- ⚠ ヘッドライトの装着と脱着は、必ずヘッドバンド⑤を伸長させてから行ってください。
ヘッドバンドが十分に伸びていないと、ジョイント部に負荷がかかり故障の原因となります。

2. ヘッドライトの装着

- ✓ ヘッドバンド⑤が伸長していることを確認してください。
- ✓ ヘッドライトを頭に被せ、バンドサイズ調節ボタン④を、親指と人差し指で内側に押し込みながら、リアボディ⑥を前方に押しつけて頭にフィットさせます。

3. ヘッドライトの脱着

- ✓ 右手の親指と人差し指で、ヘッドライト上部両側にある、バンドサイズ調節ボタン④を内側に押し込みながら後方に引いて、ヘッドバンド⑤を伸長させてください。

4. 光学部の位置調節

- ✓ 携帯バッテリー⑨の電源スイッチ⑫を押してください。バッテリーインジケーター⑪が点灯します。
- ✓ 光学部①を下方に移動します。この状態でライトが点灯します。
- ✓ ヘッドバンドが適切に頭に固定され、光学部①が顔の中心に位置し、ライトが正面を照らしているか確認してください。
- ✓ ライトの角度（上下）を操作し、作業距離で集光するよう調節します。
- ✓ 光量を調節するには、携帯バッテリー⑨の上部にある光量調節ダイヤル⑬を回してください。

5. ライトと電源の ON/OFF

- ✓ ライトの ON/OFF：電源が ON になっている時に、光学部①を上部に移動させるとライトは消灯し、光学部を下げるとライトは点灯します。
- ✓ 電源の ON/OFF：携帯バッテリー⑨の電源スイッチ⑫を押すとインジケーター⑪は消え、電源は OFF になります。
使用後は必ずこの状態にしてください。

バッテリー充電方法



1. 携帯バッテリーをクレードルにセットします。
2. USB-C ケーブルでクレードルと USB-C AC アダプタを接続します。
3. 充電を開始すると赤色の LED が点灯します。
4. 充電が完了すると赤色の LED が消灯して、充電完了を知らせます。
5. 充電後は携帯バッテリーをクレードルから取り外してください。

メンテナンスと保管

清拭

ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルの外装表面を、濃度 70% のアルコールで湿らせた不織布ガーゼ等で清拭してください。



ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルに直接アルコール等を噴霧しないでください。

光学部やヘッドライトの接合部に液体をかけないでください。

ヘッドライト本体や電気コネクター、充電クレードル、バッテリーに液体が付着しないようにしてください。

メンテナンス

衛生上ヘッドパッドは 4～6 ヶ月ごとに交換することをお勧めします。

保管方法

ヘッドライトは湿気の少ない乾燥した換気の良い安全な場所に保管し、物理的な衝撃や打撃から保護してください。製品の輸送時や長期保管時には、バッテリーを本体から外してください。

製品仕様

重量：本体 136g

携帯バッテリー 168g

明るさ：最大約 100,000LUX (距離 25cm)

バッテリー持続時間：約 8 時間 (最大光量)

製品構成

ヘッドライト本体

携帯バッテリー

クレードル

AC アダプタ

ケーブル

六角レンチ

キャリングケース