

器12 理学診療用器具
一般医療機器 再使用可能な止血帯 17230000

Hemaクリア

禁忌・禁止

末梢血流不良・浮腫・深部静脈血栓症(DVT)のある患者には使用しないこと。

四肢に感染症または悪性腫瘍がある場合は使用しないこと。

脆弱な皮膚や著しい病変がある部位には、直接適用しないこと。

四肢に120分以上適用しないこと。

肘の尺骨神経や脛骨近位の腓骨神経の直上に配置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

製品名	Hemaクリア (Sピンク)	Hemaクリア (Mグリーン)	Hemaクリア (Mレッド)	Hemaクリア (Mイエロー)
製品番号	OHK-HC-S-Pink	OHK-HC-M-Green	OHK-HC-M-Red	OHK-HC-M-Yellow
形状				
製品名	Hemaクリア (Lブルー)	Hemaクリア (Lオレンジ)	Hemaクリア (Lブラウン)	Hemaクリア (XLブラック/ホワイト)
製品番号	OHK-HC-L-Blue	OHK-HC-L-Orange	OHK-HC-L-Brown	OHK-HC-EL-BW
形状				
製品名	Hemaクリア (F)	Hemaクリア (A)		
製品番号	OHK-HC-F	OHK-HC-A		
形状				

原理

四肢に装着し圧力を加えることにより、血液を排液し血流を遮断する。

【原材料】

リング：シリコン

本体：ポリウレタン弾性繊維

【使用目的又は効果】

四肢に装着し、血液の循環を抑制し、遠位部への正常血流を遮断する。

【使用方法】

- 付属の測定テープを用いて、閉塞部位の周囲長を測定し、適切なモデル (Small、Medium、Large、Extra-Large) を選択してください。
閉塞部位
 - 手の手技：手首から10cm上部
 - 前腕・肘・遠位上腕骨の手技：前腕中部かそれよりも上部
 - 足の手技：外果（ふくらはぎの筋肉の下）から5～15cm上部
 - 足首・下腿・膝・遠位大腿骨の手技：大腿中部または上部
- 手の指先/足先から閉塞部位までの長さを測定し、選択ガイドに基づき、最大長を越えていないか確認します。
- 患者の収縮期血圧が、選択ガイドで示された上限値を越えていないことを確認します。
皮膚への圧力については、色分けされた圧力表を参照してください。

- 無菌操作を用い、デバイスの外装を開封し、内包装はそのままの状態が無菌野に置きます。
- 無菌操作を用い、内包装からHemaクリアを取り出します。
同封の保護カードは処置終了時まで保管してください。
- 装着
 - 上肢
指先を開口部へ挿入します。
全ての指がリングの円周内に挿入されていることを確認します。助手は腕を掌側から固定します。
ハンドルをしっかりと握り、腕に沿って近位方向へ閉塞位置に到達するまでハンドルを引きます。
 - 下肢
ハンドル側を上向きにし、ハンドルは上下になるようにしてください。リングを広げ、すべての指がハンドルの間から出るように押し下げます。
患者の近位側に立ち、助手は患者の足と足首を固定します。
ハンドルをしっかりと握り、まずは足に沿って、次に近位側に引っ張ります。かかとを通すには下側のハンドルをより強く引きます。かかとを越えたら、閉塞位置に到達するまでハンドルを引きます。
- Hemaクリアを閉塞部位に配置したら、ストラップをHemaクリアのリングより遠位側の四肢に巻き付けるか、切断してください。
- ストッキングを上へ引き上げる、または布地を切り開くことで手術部位を露出させます。
注：糸くずを最小限に抑えるため、切断前に滅菌水または生理食塩水で布地を湿らせてください。
- 止血の時間はHemaクリアを設置した時点で開始してください。
- 処置終了後、保護カードをリングの遠位側から挿入し、ストラップを引きながらリングを切断します。
はさみで残りのストッキングを切断・除去してください。
これにより四肢への血流が再開します。

【使用上の注意】

- Hemaクリアは、医師、または医師の指示により使用してください。
- 四肢が不安定な状態（骨折、脱臼）の場合は、四肢を安定させるために牽引を行ってください。
- 患者の収縮期血圧が推奨上限値を超えない限り、動脈血流を遮断できません。各モデルにおける収縮期血圧の上限値については、選択ガイドを参照してください。
- 閉塞部位の周囲長が14cmから85cmの範囲にある四肢に適用可能です。
- 閉塞部位の周囲長が14cm未満または85cmを超える場合は、使用しないでください。各モデルの周囲長の適応範囲については、選択ガイドを参照してください。
- Hemaクリアが四肢への血流を止めない場合は、直ちに除去してください。

【保管方法及び有効期間】

- 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL:03-5810-1735 FAX:03-5810-1736

製造業者：オネッグ ハカーメル社
Oneg HaKarmel Ltd
(イスラエル・ノーザンディストリクト)