

医05 副木 36204000
一般医療機器 成型型副木

サムスリング-II (骨盤固定スリッガー軍用)

再使用禁止*1


【禁忌・禁止】

以下の場合には使用しないこと。

- ・ 腰部に当てぬこと。
- ・ その他、医師が不適当と判断した場合

【形状・構造及び原理等】

パッド、スリング部
柔らかく浸透性の
高いトリコット

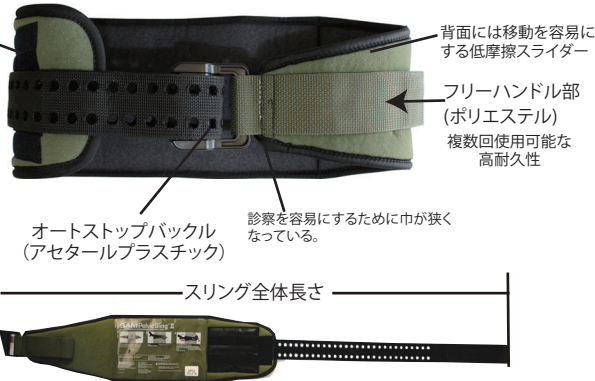

品番	スリング全体長さ	パッド面	重量
SAM4922(M)	約 152.4 cm	18(縦)x27.5(横)cm	約 250



【使用目的又は効果】

損傷した、或いは損傷の疑いのある


骨盤を固定すること。 適正ニュートン値でオートストップ

品番	対応臀部サイズ	ニュートン値
SAM4922(M)	81-127cm	150N


【使用方法】

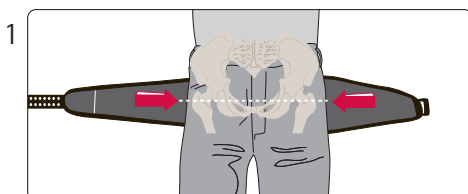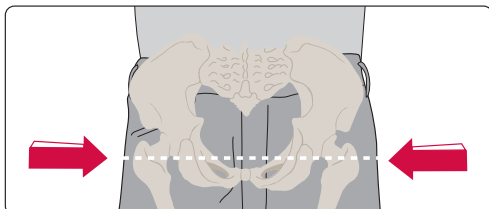

患者のパンツのポケットを空にしたり、臀部周辺に何も異物がないことを確認する。
スリングの白い面を上にして患者の大転子（臀部）の下に差し込む。

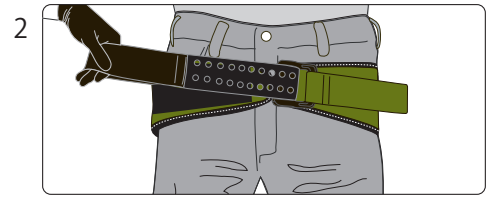

黒のストラップをバックルに通し、ストラップを引く。

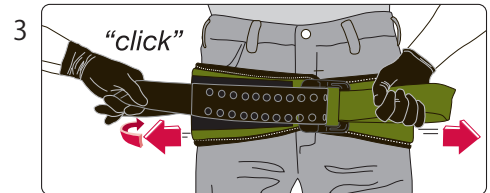

グリーンストラップを掴み、黒のストラップを反対側に水平に「カッチ」とクリック音が聞こえるまで引っ張る。
(二人同時に両方から引っ張るのが望ましい。)
そのままの状態、黒のストラップをサムスリングの表面にしっかりと押しつける。

【MRI検査時の注意】

1. MRI検査時には必ず装着したまま検査すること。
2. 検査の前後にスリングを外して、そのまま放置しないこと。
3. スリングを外す時は医師の指示に従ってゆっくりと外すこと。

【その他の注意】

- ・ 汚れた場合は冷水で洗たく機での洗濯ができる。(洗濯アミの使用を推奨。)
- ・ 温水、漂白剤等は使用しないこと。
- ・ 洗濯後は完全に乾燥させてから使用すること。
- ・ 高圧蒸気滅菌器は使用しないこと。
- ・ スリングは繰返し使用できるが、消耗品的要素があるので、外見上汚れがひどかったり、使用上劣化がひどいと思われる場合は新品と交換すること。

【包装】 1個単位

【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者：サムメディカルプロダクツ社
SAM MEDICAL PRODUCTS
(アメリカ・オレゴン州)