



# 骨盤固定ベルト サムスリング II

## pelvic sling II



**SAM**<sup>®</sup>  
MEDICAL

## 骨盤固定ベルト サムスリング II

X-RAY



**骨盤整復固定具** 骨盤損傷による出血は、生命の危険に関わります。サムスリングは骨盤を素早く整復固定します。

### 特許取得のオートストップバックル

適切なニュートン値に達するとストラップは停止  
最適な圧力で骨盤を固定して、過剰な締め付けを防止  
サムスリングだけの特徴です。

X線/CT/MRIに対応

ストラップとスリングの  
ベルクロは素早くしっかりと密着


低摩擦により傷病者の臀部下へ  
容易に滑り込ませることが可能




前方部分が幅狭のため、尿道カテーテルや  
IVR、創外固定治療を受ける場合にも妨げに  
ならない




スリングには丈夫な素材を採用  
通常の洗浄で繰り返し使用可能

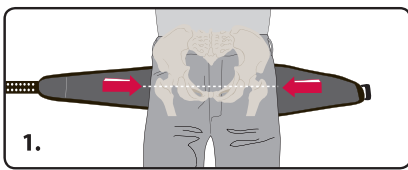

1. 受傷者のパンツのポケットを空にし、臀部周辺  
に何も無いことを確認する。  
サムスリングの黒い面を上にして受傷者の大転子  
(臀部) の下に滑り込ませる。

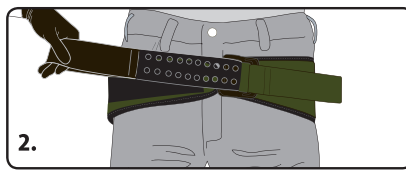

2. 黒のストラップをバックルに通し、ストラップ  
を引く。

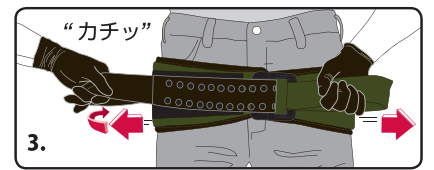

3. “カチッ”  
OD グリーンストラップをつかみ、黒のスト  
ラップを反対側に水平に「カチッ」とクリック  
音が聞こえるまで引っ張る。そのままの状態  
で、黒のストラップをスリングのベルクロに  
しっかりと押し付ける。

製品番号	SAM4922	SAM4121	SAM4122
製品名	SAMスリングIIスタンダード軍用	SAMスリングIIスモール	SAMスリングIIスタンダード
スリングサイズ	約1460mm	約1350mm	約1460mm
(パッド面)	L270 × W180mm	L270 × W180mm	L270 × W180mm
対応臀部サイズ	813-1270mm	686-1143mm	813-1270mm
重さ	約250g	約244g	約250g
ニュートン値	150N		
素材	パッド、スリング部(トリコット) ハンドル部(ポリエステル) バックル(アセタールプラスチック)		
価格	¥30,000 (税別)		
JANコード	4535851049220	4535851041217	4535851041224

⊗ 単回使用

製造販売届出番号: 13B3X00138000020



SAM4121 / SAM4122

+ 使用方法・動画



サムスリングII使用方法 / よくある質問



製造販売業者  
**ACCORD**  
INTERNATIONAL INC.

アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F

TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736

www.accord-intl.com

製造販売業許可番号: 13B3X00138

製造業者  
**SAM**  
MEDICAL  
サムメディカルプロダクツ社  
(米国・オレゴン州)