

医05 副木 36204000
一般医療機器 成型型副木


サムスリング-II
(骨盤固定スリング)

再使用禁止^{*1}

【禁忌・禁止】

- 以下の場合には使用しないこと。
- ・ 腰部に当てぬこと。
 - ・ その他、医師が不適当と判断した場合

【形状・構造及び原理等】

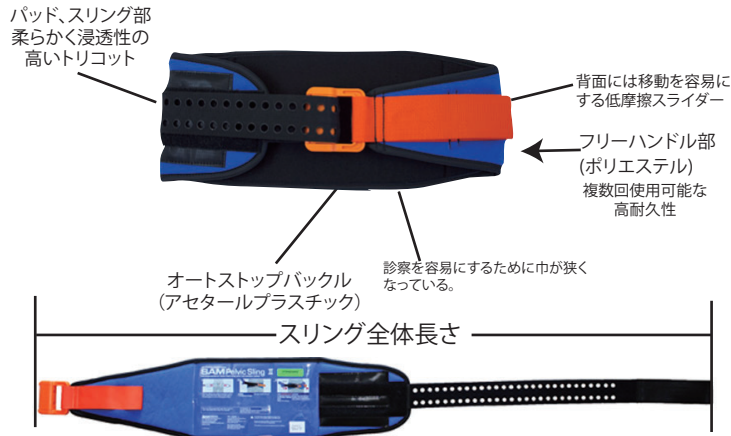

品 番	スリング 全体長さ	パッド面	重 量
SAM4121	約 1350mm	180(縦)x270(横)mm	約 244g
SAM4122	約 1460mm	180(縦)x270(横)mm	約 250g
SAM4123	約 1580mm	180(縦)x270(横)mm	約 260g


【使用目的又は効果】

損傷した、或いは損傷の疑いのある
骨盤を固定すること。


適正ニュートン値でオートストップ

品 番	対応臀部 サイズ	ニュートン値
SAM4121	686-1143mm	150N
SAM4122	813-1270mm	150N
SAM4123	915-1371mm	150N


【使用方法】

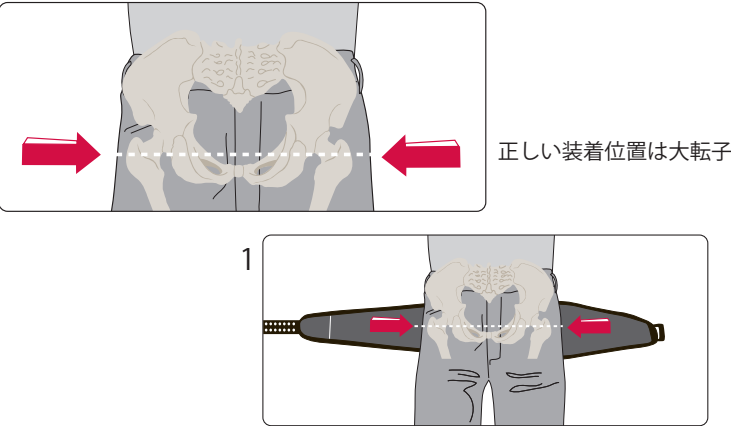

患者のパンツのポケットを空にしたり、臀部周辺に何も異物がないことを確認する。
スリングの白い面を上にして患者の大転子（臀部）の下に差し込む。

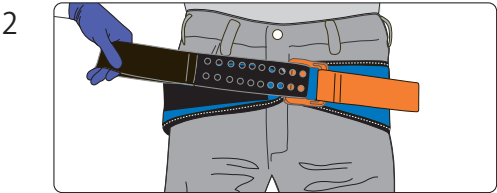

黒のストラップをバックルに通し、
ストラップを引く。

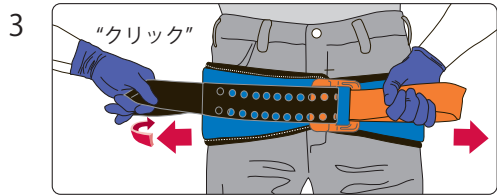

オレンジのストラップを掴み、黒のストラップを反対側に水平に「カッチ」とクリック音が聞こえるまで引っ張る。
(二人同時に両方から引っ張るのが望ましい。)
そのままの状態、黒のストラップをサムスリングの表面にしっかりと押しつける。

【MRI検査時の注意】

1. MRI検査時には必ず装着したまま 検査すること。
2. 検査の前後にスリングを外して、そのまま放置しないこと。
3. スリングを外す時は医師の指示に従ってゆっくりと外すこと。

【包装】 1個単位

【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【保管方法及び有効期間等】

- ・水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製 造 販 売 業 者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製 造 業 者：サムメディカル プロダクツ社
SAM MEDICAL PRODUCTS
(アメリカ・オレゴン州)