

医05   副木   36204000  
一般医療機器   成型型副木

# サムスリング-II (骨盤固定スリッガー軍用)


再使用禁止\*1

【禁忌・禁止】

以下の場合は使用しないこと。

- ・ 腰部に当てぬこと。
- ・ その他、医師が不適当と判断した場合

【形状・構造及び原理等】

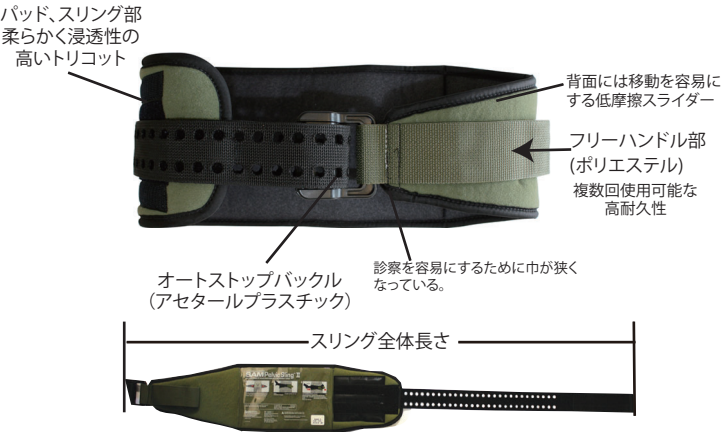



| 品 番        | スリング<br>全体長さ | パッド面                | 重 量   |
|------------|--------------|---------------------|-------|
| SAM4922(M) | 約 152.4 cm   | 18( 縦 )x27.5( 横 )cm | 約 250 |

【使用目的又は効果】


損傷した、或いは損傷の疑いのある  
骨盤を固定すること。      適正ニュートン値でオートストップ

| 品 番        | 対応臀部<br>サイズ | ニュートン値 |
|------------|-------------|--------|
| SAM4922(M) | 81-127cm    | 150N   |

【使用方法】

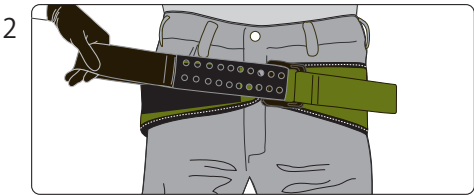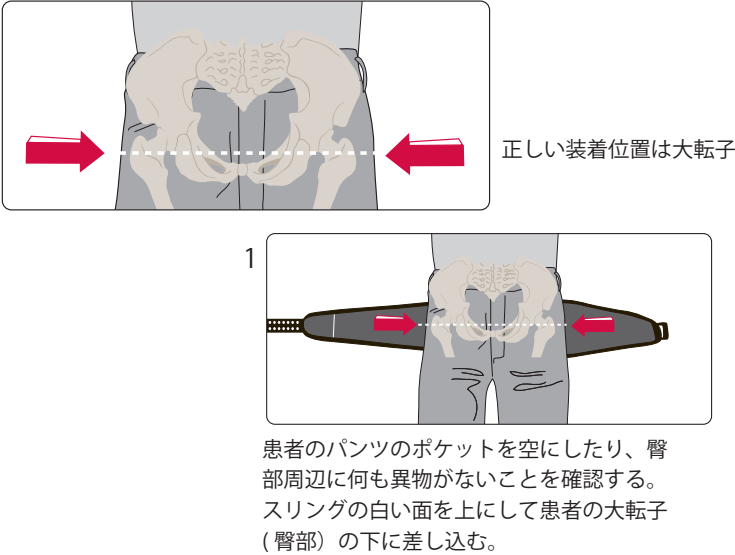

黒のストラップをバックルに通し、  
ストラップを引く。

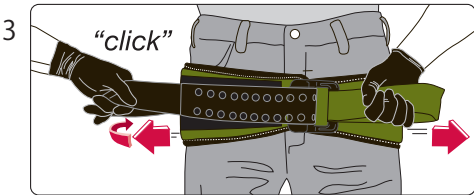

グリーンのストラップを掴み、黒のストラップを反対側に水平に「カッチ」とクリック音が聞こえるまで引っ張る。  
(二人同時に両方から引っ張るのが望ましい。)  
そのままの状態、黒のストラップをサムスリングの表面にしっかりと押しつける。

【MRI検査時の注意】

1. MRI検査時には必ず装着したまま 検査すること。
2. 検査の前後にスリングを外して、そのまま放置しないこと。
3. スリングを外す時は医師の指示に従ってゆっくりと外すこと。

【包装】 1個単位

【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【保管方法及び有効期間等】

- ・水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製 造 販 売 業 者：アコードインターナショナル株式会社  
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F  
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736  
  
製 造 業 者：サム メディカル プロダクツ社  
SAM MEDICAL PRODUCTS  
(アメリカ・オレゴン州)